


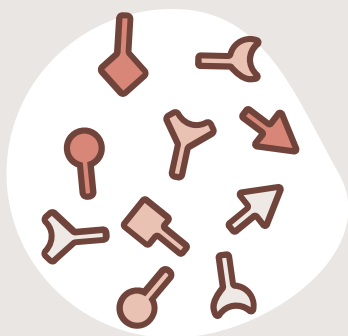

Om två personer har samma HLA-typ anses de vara "matchade".

HLA-typning är ett slags genetiskt test som används för att identifiera vissa individuella variationer i en persons immunsystem. HLA-matchning används för att identifiera vilka personer som på ett säkert sätt kan donera stamceller, ett organ eller benmärg till en person som behöver en transplantation. Alla stamcellsbehandlingar behöver inte en matchning, men det finns några som absolut kräver det.

01

Kontrollera informationen på kuverten innan provet/proverna samlas in

02

Den/de som ska utföra provet rekommenderas att varken äta eller dricka minst en timme innan provet samlas in.

03

Öppna OmniSwab-förpackningen vid handtaget och ta försiktigt ur Omni-Swab.


OBS! Undvik att röra uppsamlingsplattan, dvs den platta spetsen av insamlingsspinnen. Kasta plastförpackningen.

04

Håll i plasthandtaget på insamlingsspinnen och skrapa uppsamlingsplattan ordentligt mot insidan av båda kinderna och under tungan, 10 ggr, varje gång i ca 3 sekunder. Var försiktig så att du inte matar ut spetsen.

05

Använd en ny insamlingspinne och tillhörande kuvert, för varje person som ska testas.

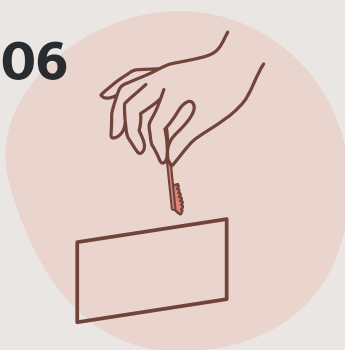06

Lägg insamlingsspinnen i det mindre kuvertet tillhörande rätt person. Använd inte plasten att lägga insamlingsspinnen i. Lägg ner det lilla kuvertet/kuverten i det större förfrankerade kuvertet och posta det.