

Informations pour les patients

cathéter tunnéisé permanent pour le drainage d'un épanchement pleural ou péritonéal

ewimed

Système pour un soulagement efficace des symptômes lors d'épanchements pleuraux et/ou d'ascites





Chère lectrice, cher lecteur,


Vous ou un membre de votre famille avez développé une maladie qui provoque un épanchement pleural récidivant («eau dans les poumons») ou une ascite récurrente («eau dans le ventre»). Ces accumulations excessives de liquide entraînent des symptômes tels qu'essoufflement, épuisement, perte d'appétit et/ou nausées.

Dans cette brochure, nous souhaitons vous informer sur la possibilité de soulager ces symptômes provoqués par l'épanchement pleural et/ou l'ascite, grâce au cathéter tunnéliné permanent drainova® ou drainova® ArgentiC ainsi que sur le service que nous vous apportons pour vous former à l'élimination du liquide à l'aide de nos kits de drainage.

Vous aurez aussi un aperçu sur l'ensemble du processus, de l'implantation du cathéter au suivi du drainage à domicile grâce au concept de soins et services ewimed.


Qu'est-ce qu'un épanchement pleural ?

Un épanchement pleural est une accumulation de liquide dans l'espace pleural. L'espace pleural est situé entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Les causes les plus courantes d'un épanchement pleural sont certains cancers, la pneumonie ou l'insuffisance cardiaque.

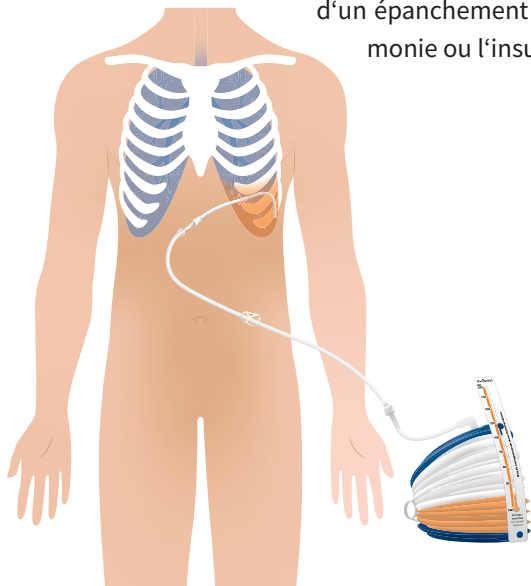

L'ascite est une accumulation excessive de liquide dans l'abdomen. Les causes les plus courantes d'ascite sont certains cancers, une cirrhose du foie ou une insuffisance cardiaque.

Qu'est-ce qu'une ascite ?

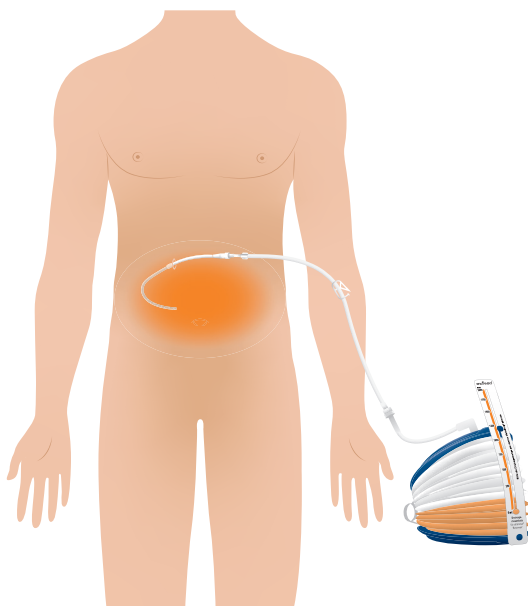


Pour soulager ces symptômes, l'épanchement doit être ponctionné régulièrement par votre médecin à l'hôpital ou en clinique. Afin de vous épargner des ponctions récurrentes, votre médecin peut vous recommander l'implantation d'un cathéter tunnélisé permanent.

Comment soulager les symptômes des épanchements pleuraux ou des ascites ?

L'implantation

Le cathéter drainova® ou drainova® ArgentiC est un tube en silicone souple et flexible qui reste en place et ne doit pas être changé. Le cathéter est donc implanté une seule fois, sous anesthésie locale, à l'hôpital ou en clinique, soit en ambulatoire, soit durant une courte hospitalisation. Le cathéter est muni d'un manchon en polyester qui adhère au tissu sous-cutané. Cela évite que le cathéter ne bouge et empêche aussi la pénétration des germes.

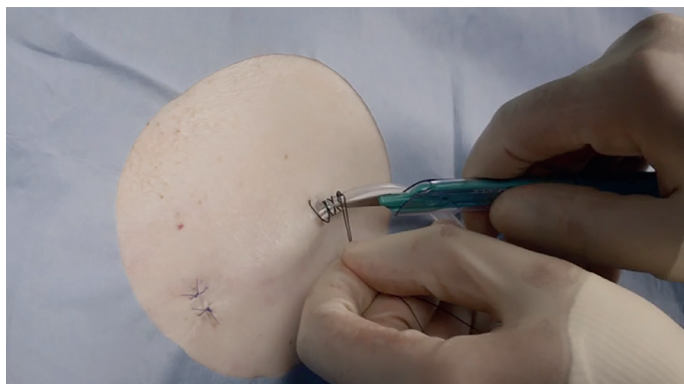

Après l'implantation, environ 10cm du cathéter avec la valve de sécurité du cathéter restent visibles à l'extérieur du corps. Un réservoir ou une poche de recueil en gravité est relié à la valve de sécurité du cathéter pour le drainage, afin d'évacuer le liquide qui s'accumule dans la cavité corporelle. La durée du drainage est d'environ 10–20 minutes. Après le drainage, la valve de sécurité du cathéter est fermée à l'aide d'un capuchon de valve qui la protège contre de potentiels dommages ou contaminations. Après le drainage, le cathéter est protégé par un pansement. Il n'est pas visible sous les vêtements. Le pansement est recouvert d'une protection imperméable qui permet de se doucher.





Nombreux **orifices de drainage biseautés** pour éviter l'occlusion.

Le cathéter **drainova® ArgentiC**

• **Manchon en polyester** fibrose avec le tissu souscutané et empêche la pénétration des germes.

Une **bande de sulfate de baryum** est intégrée pour assurer la visibilité du cathéter aux rayons X.

Valve de sécurité
haute sécurité pour les patients grâce au principe «clef-serrure» qui empêche l'air de pénétrer et le liquide de sortir sans contrôle.

Utilisation du cathéter tunnéisé permanent à domicile

La sortie de l'hôpital

Après l'implantation du cathéter ou en fin de séjour à l'hôpital ou en clinique, un membre du personnel soignant envoie l'ordonnance médicale à ewimed Switzerland AG.

Le rendez-vous pour la formation

L'entreprise ewimed Switzerland AG organisera avec vous un rendez-vous de formation à domicile. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de contacter et d'instruire votre service de soins à domicile ou les soignants d'un service de transition, d'une clinique de réadaptation ou d'une maison de retraite.

La formation

Un(e) spécialiste produits d'ewimed Switzerland AG vient à votre domicile pour vous former et vous donner toutes les instructions nécessaires. Le processus à respecter lors du drainage et du changement de pansement vous est expliqué étape par étape. Vous recevez également un dossier dans lequel vous pourrez relire toutes les informations. De plus, vous pouvez trouver toutes les vidéos de formation sur notre site internet : www.ewimed.ch

La commande du matériel et la prise en charge des coûts

Le matériel de drainage est livré directement à votre domicile sans frais de port par la poste. Nos kits de drainage sont des produits répertoriés dans la LiMA. Le coût des kits de drainage est couvert à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Si vous vivez dans un home ou une institution, la facture sera réglée par ce dernier avec votre assurance maladie. Si votre compagnie d'assurance maladie a des questions, elle peut sans autre nous contacter.

Vous pouvez commander les kits de drainage directement sur notre site internet, par téléphone ou par e-mail.

Vos avantages en résumé :

- + Instruction gratuite par un/e spécialiste produits d'ewimed à votre domicile.
- + Le drainage temporaire à domicile est simple et sûr. Les ponctions récurrentes à l'hôpital vous sont épargnées.
- + Votre qualité de vie s'améliore, car vous pouvez drainer vous-même l'épanchement selon les besoins et ainsi bien contrôler les symptômes pénibles liés à l'épanchement.
- + S'il n'y a plus d'épanchement après quelques semaines, le cathéter peut être retiré par votre médecin sous anesthésie locale.



ewimed Switzerland AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +4152 577 02 55
info.ch@ewimed.com
www.ewimed.ch



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter du lundi au jeudi de 08 :00 à 17 :00 et vendredi de 08:00 à 16:00.



Vous pouvez également trouver des informations plus détaillées sur notre site internet
www.ewimed.ch

