

Information et consentement pour l'implantation d'un cathéter péritonéal permanent tunnélisé

(pour un drainage temporaire à domicile)

Pourquoi le cathéter est-il implanté ?

Si vous êtes confronté à certaines maladies, l'un des symptômes concomitants peut être l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale (ascite) qui peut vous gêner considérablement dans votre vie quotidienne (sensation de satiété, perte d'appétit, vertiges, essoufflements...). Pour soulager vos symptômes, ce liquide doit être ponctionné de temps en temps à l'hôpital. Au lieu des ponctions récurrentes, vous pouvez maintenant bénéficier d'un cathéter péritonéal permanent tunnélisé. Ce cathéter vous permet de drainer (évacuer) vous-même le liquide à la maison, temporairement et selon les besoins. Les troubles liés à l'accumulation de liquide sont réduits et peuvent être contrôlés. Pour que cette procédure soit facile et sûre pour vous, vous serez accompagné et formé à votre domicile par un spécialiste de l'entreprise ewimed Switzerland AG.


Le cathéter permet une grande liberté de mouvement car il suffit de connecter un système de drainage pendant 10 à 30 minutes selon les besoins. Si, après quelques semaines, il n'y a plus d'accumulation de liquide, le cathéter péritonéal peut être retiré sous anesthésie locale.

Comment se déroule l'implantation d'un cathéter ?

La procédure n'est pas très différente d'une ponction d'ascite. L'intervention peut être précédée d'une mise sous perfusion. À l'aide d'une échographie ou d'une radiographie, le médecin détermine le site approprié pour l'insertion du cathéter. L'intervention peut être pratiquée en ambulatoire ou lors d'un séjour hospitalier de courte durée. La peau et les muscles sont rendus insensibles par une anesthésie locale et on vous donnera un somnifère léger si nécessaire.

Le médecin fait une ponction et deux petites incisions distantes de 4 à 7 cm. Il passe le cathéter sous la peau et l'insère dans la cavité abdominale. Le médecin suture le site d'introduction du cathéter et fixe le cathéter à la peau au point de sortie du cathéter. À l'extrémité visible du cathéter se trouve une valve de sécurité à laquelle peut être relié le système de drainage temporaire, par exemple une poche de recueil ou un dispositif par aspiration douce, afin d'évacuer le liquide du corps.

Une légère douleur au site où le cathéter a été inséré peut-être possible 1-3 jours après l'intervention. Le cathéter est fin, souple et flexible et est positionné sur une compresse mousse pour votre confort et est recouvert d'un pansement auto-adhésif plastifié pour vous permettre de vous doucher. Le dispositif n'est pas visible sous les vêtements.

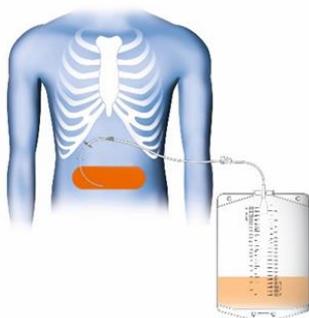

Quels sont les risques liés à l'implantation d'un cathéter permanent ?

Le taux de complication lié à l'insertion d'un cathéter est faible. Les problèmes suivants sont occasionnellement relevés :

- Hématome local au site de l'implantation et saignement mineur au point d'entrée et de sortie du cathéter. Les hémorragies graves sont extrêmement rares.
- Écoulement de sécrétions ou d'ascite au point d'entrée ou de sortie du cathéter (rare)
- Lésion de l'intestin (perforation, très rare)
- Les infections sont rares (elles peuvent être traitées par des antibiotiques ou, en cas d'infection plus importante, le cathéter peut être retiré).

Dans le pire des cas (p.ex. une hémorragie), une opération pourrait s'avérer nécessaire (très rare)

Autre alternative

Des ponctions répétées. Toutefois, les complications susmentionnées peuvent également survenir en cas de ponctions péritonéales répétées.

Mesures avant l'intervention

- Rester à jeun dès minuit la nuit précédant l'intervention
- Selon l'ordre de votre médecin, arrêt temporaire des anticoagulants et ou des antiplaquettaires (par exemple Marcoumar, Sintrom, Aspirine, Plavix, Arixtra, Eliquis, Xarelto, Pradaxa...)

Mesures après l'intervention

- Ne pas conduire soi-même un véhicule le jour de l'opération
- Les symptômes particuliers (douleurs abdominales, fièvre, frissons...) nécessitent une consultation médicale immédiate, si nécessaire directement aux urgences

Immédiatement après l'implantation du cathéter, le médecin ou une infirmière contacte ewimed Switzerland AG pour fixer un rendez-vous pour la formation à domicile. Le spécialiste des produits de ewimed Switzerland AG expliquera en détail comment effectuer le drainage et changer le pansement et remettra les documents nécessaires. Les kits de drainage sont dans la liste LIMA et sont remboursés par votre assurance de base. Les kits de drainage sont livrés à votre domicile sans frais de port.

J'ai, soussigné(e) le (la) patient(e), été informé(e) par le médecin, lors d'un entretien préalable à l'intervention, du diagnostic, du type, du but et du déroulement de l'intervention et du traitement décrits ci-dessus de manière compréhensible. J'ai pu évoquer mes problèmes particuliers. J'ai également été informé des conséquences possibles dans la période qui suivra l'implantation.

Je confirme que j'ai mentionné toutes mes pathologies, problèmes et réactions particulières connus (par exemple allergies, tendance aux saignements, crampes...).

Après une explication compréhensible, je donne mon consentement éclairé pour l'intervention et le traitement prévus. Mon consentement s'étend également à toutes extensions ou modifications résultantes de procédures ou de découvertes postopératoires.

Lieu / Date / Heure

Signature patient(e)

Signature médecin

Source : matériel d'information de la société ewimed Switzerland AG