

CE



VISIR VRIGSTAD VERSION COVID

MÄRKNING

Triple Sign System AB 1 MET5659(covid-19) 3

Triple Sign System AB = tillverkare

1 = optisk klass

MET5659(covid-19) = aktuell standard

3 = användningsområde mot vätska och stänk

BRUKSANVISNING

Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för varje användare.

Visiret är avsett att skydda mot droppsmitta enligt PPER (EU) 2016/425 och är provad enligt standard MET5659 utgåva 3.

EU-typkontrollen är genomförd av:

RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857, SE-50115 BORÅS

Anmält organ nr 0402.

EU försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på vår hemsida.

www.vrigstadexpo.se

Visiret skall inte användas efter att MET5659 slutat gälla, men kasseras senast 2021-12-31.

Visir Vrigstad version COVID
Tillverkare Triple Sign System AB
Värmdövägen 738, 132 45 Saltsjö-Boo
Organisationsnummer: 556501-5525
info@vrigstadexpo.se
www.vrigstadexpo.se
Telefonnummer 0703125728


CE



Visiret kan återanvändas. Då krävs rengöring, desinfektion och inspektion:


- 1) Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
- 2) Tag på skyddshandskar.
- 3) Rengör och desinfektera visirets plastdelar med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Bearbeta mekaniskt med torkpapper över hela ytan.
- 4) Om skador på visiret är synliga skall det kasseras.

Vid påtagning

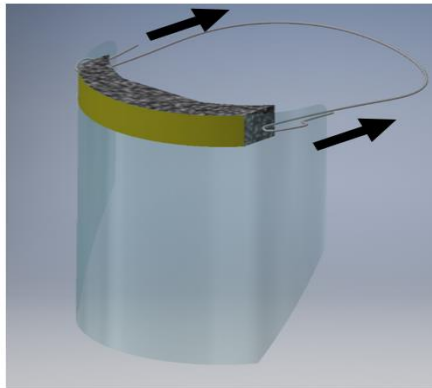

- 1) För visiret mot huvudet med svettbandet mot pannan
- 2) Dra i fästbandet bakåt med höger och vänster hand tills det sitter bekvämt på huvudet

Vid avklädning

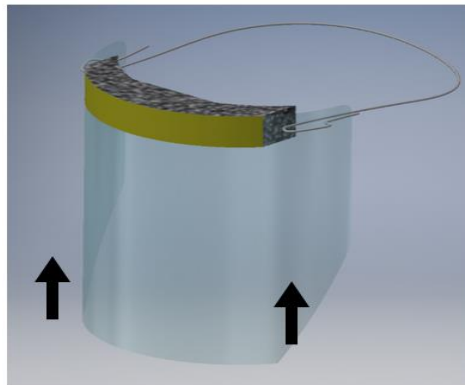

- 1) För visiret uppåt och lägg på avsedd plats