

*Thérapie interactive intelligente pour
apnées obstructives du sommeil & ronflements*

Night Shift
Instructions d'utilisation

Renvoyer après la période d'essai:

Vous recevrez par SMS et par e-mail une invitation à renvoyer votre Night Shift. L'envoi est gratuit en cas d'utilisation de l'emballage fourni avec l'appareil.

Vous avez encore des questions?

Appelez notre service client au 0800/145.47, envoyez un e-mail au cs@vivisol.be ou naviguez vers www.nightshift.vivisol.be

Un mode d'emploi complet est fourni à l'achat.



Distribué par:



Zoning Ouest 14 - 7860 Lessines

t 0800/145.47

e cs@vivisol.be

www.vivisol.be



*Thérapie interactive intelligente pour
apnées obstructives du sommeil & ronflements*

NS/FR/2/10.2016

Fixez le Night Shift autour du cou comme illustré sur les photos ci-dessous:



Réglez le collier sans trop serrer de sorte à pouvoir glisser deux doigts de chaque côté:



Vous pouvez maintenant tester votre Night Shift, la batterie interne est complètement chargée pour 3 nuits. Vous pouvez charger le Night Shift au moyen du câble USB livré avec l'appareil. Vous pouvez connecter ce câble à votre ordinateur ou via une prise USB (non fournie).

Marche : appuyez sur le bouton blanc pendant 1 seconde avant de vous coucher.

Arrêt : au réveil, appuyez brièvement sur le bouton blanc.

Remarque : lorsque vous appuyez sur **Marche**, l'appareil émet 3 brèves vibrations successives. Cela signifie que la batterie est chargée pour 3 nuits

2 vibrations = batterie chargée pour 2 nuits

1 vibration = batterie chargée pour 1 nuit

