



Bruksanvisning




k e r u v e

KOMPONENTER

GPS-enhet

Keruve finns i olika versioner och utföranden. I exemplet nedan visas enheten som en klocka.


Klocka

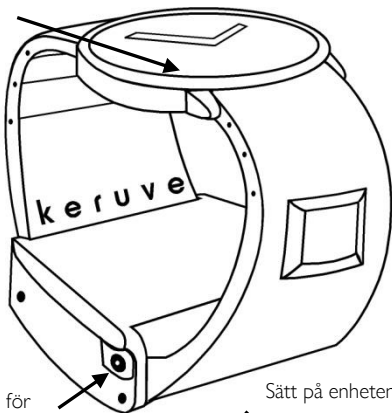


Kontakt för
batteriladdning

Sätt på enheten med
medföljande
specialverktyg

Ladd- och
statusindikator-
lampa

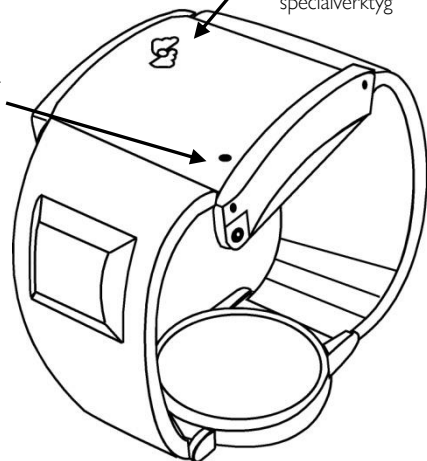


Batteriladdare

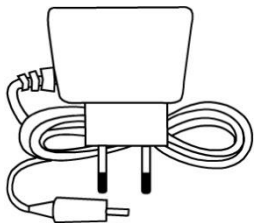

Laddare för GPS

Specialverktyg

Magnet för att sätta på GPS-enheten samt göra en reset

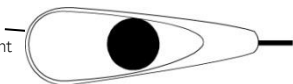

för säkerhetslåset

Har ni valt ett låsbart armband till gummiarmbandet så ingår ett liknande tillbehör med tre små pinnar på verktygets långsida istället.

SIM-kort

Både anhörigenheten och GPS-enheten har SIM-kort förinstallerade så att de kan kommunicera med varandra. Kostnaden för SIM-kort och trafikavgifter ingår i Posifons månadsavgift vid avsedd användning.

HANTERING AV GPS-enhet


Laddning

Sätt GPS-laddaren i enheten och sedan i vägguttaget. Kontrollera att laddningsindikatorn lyser.

Det tar ungefär 4-5 timmar att ladda batteriet fullt.

När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn samt att batterinivån på anhörigenhetens bildskärm uppdateras såvida anhörigenheten är påslagen. Självklart uppdateras även batteriindikatorn i appen eller på internetportalen.

Justering av armband

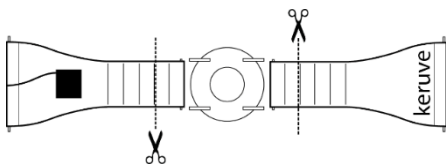

Gummiarmband

Båda sidorna av armbandet bör kortas av lika mycket. Skär/klipp längs spåren på undersidan av armbandet, på den smala delen närmast klockan (se bild). Mät gärna omkretsen på användaren handled innan ni klipper för att säkerhetsställa att det inte blir för litet.

Läderarmband

Öppnar sprinten närmast uret med medföljande verktyg och justerar armbandet genom att föra in sprinten i ett annat hål (markerat med en röd söm).

Sätta klockan på armen

Placera klockan på användarens handled. Beroende på vilket armband ni använder så gör ni på olika sätt. Ett låsbart armband eller läderarmband trycker man ihop de två armbandsdelarna. Används ett gummiarmband med ett öppningsbart spänne så stänger man armbandet likt en vanlig klocka med metallspänne.



Öppna säkerhetslåset

Gummiarmband

Ett låsbart gummiarmband öppnas med hjälp av specialverktygets tre pinnar som förs in i de tre hålen på armbandet. Det öppningsbara armbandet har en vanlig metallänk som öppnas likt en vanlig klocka med metallspänne.

Läderarmband

Låsbara läderarmband har ett litet hål på ena sidan av armbandet där det finns en tydlig delning mellan de två armbanden. För in medföljande specialverktyg i hålet, tryck lite lätt och drar isär, se vänstra bilden nedan. Det öppningsbara armbandet öppnas genom att du trycker med tummen på området som tydligt delar de två armbandsdelarna, se högra bilden nedan.

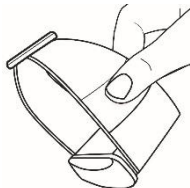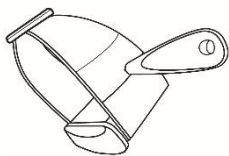

Bältesenhet

Öppnas lättast genom att föra in specialverktyget in i ett av fyra hål på enhetens sida.

Starta GPS-enheten

Om statusindikatorn inte blinkar betyder detta att klockenheten är avstängd. Var noga med att se efter att statusindikatorn blinkar (var 3e sekund) efter att du tar ur laddaren för att säkerhetsställa att enheten är på.

Starta:

1. Placera magneten på nyckeln över logon cirka 4 sekunder tills statusindikatorn börjar blinka. Enheten startar också när laddaren förs in.
2. Tag bort nyckeln så snart lampan börjar blinka.

Vill ni kunna stänga av enheten så kontakta supporten.

Förvara inte klockan i en handväska, ryggsäck eller nära metallföremål då den är startad, täck den inte heller med metallföremål. Detta kan störa klockans funktion

Blinkande statusindikator

När GPS-enheten är påslagen blinkar statusindikatorn, som är en röd liten lampa. I början, då enheten startas, blinkar lampan snabbt. Då den fått anslutning till mobilnätet börjar den blinka var tredje sekund. Blinkar den lite snabbare (var 1.5 sekund) håller på att ta en position. Om indikatorlampan börjar blinka långsammare (var 6e sekund) indikerar detta att enheten inte har mobilnätsanslutning och därför inte kan skicka positionsuppgifter.

Om GPS-enheten inte har mobilnätstäckning under 10 minuter stängs den av automatiskt i 15 minuter för att spara batteri. Därefter startar den igen automatiskt och försöker ansluta till mobilnätet.

Användandet av PosifonCare

Larmmottagning och konfiguration av GPS-enhetens funktioner görs i PosifonCare. Se mer information om detta i separat material.

Vid problem

Om enheten inte fungerar som den ska, testa att göra en återställning genom att sätta i laddaren i enheten.

Keruve GPS-enhet

- Storlek och vikt: 38 x 45 x 16 mm / 36g
- Standby tid: 3,5 dagar

Keruve Anhörigenhet

- Storlek och vikt: 144 x 82.5 x 19 mm / 141g
- Standby tid: 2 dagar

Snabbguide

Var noga med att se efter att statusindikatorn blinkar var tredje sekund efter att du tar ut laddaren.

Starta GPS-enheten genom att sätta i laddaren eller placera magneten på nyckeln över logon, på elektronikenheten, cirka 2 sekunder tills statusindikatorn börjar blinka.

När indikatorlampan blinkar var tredje sekund har GPS-enheten mobiltäckning. Blinkar indikatorlampan lite snabbare var 1.5 sekund så försöker enheten att ta en position. Lyser indikatorlampan så kan den inte koppla upp mot något mobilnät och blinkar indikatorlampan var 6e sekund så har den ingen mobiltäckning.

GPS-enheten har upp till 3.5 dagars standby tid. Ladda enheten 5 timmar för att säkerhetsställa att den är fulladdad.

Kontakt

	Posifon AB
Adress:	Sven Hultins Gata 9C, 412 58 Göteborg
Hemsida:	www.posifon.se
Tel. support:	031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)
Mail support:	support@posifon.se

CE 168