


# Snabbstart guide Posifon Nano

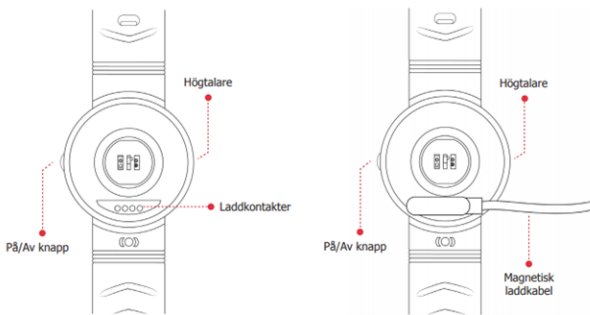

## 1. Ladda din Posifon Nano

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Enheten laddar fullt på ungefär 2 timmar.

## 2. Innan användning, se till att Posifon Nano är PÅ

Posifon Nano har två LED-lampor på enhetens ovansida. Se nedan vad de olika kombinationerna av ljussignaler innebär. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd eller LED-lamporna avstängda. Tryck på knappen på enhetens sida (PÅ/AV-knappen) för att starta enheten och dess LED-lampor.

### Guide Nano LED-lampor:

#### Grön LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund

Långsamma och långa blinkningar

Lyser med till fast sken (blinkar ej)

= ansluten till GSM-nätet

= ansluten till GPRS-nätet

= söker GSM-nätet

= inget eller felaktigt SIM-kort

#### Blå LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

Långsamma och långa blinkningar

Lyser med fast sken

Lysdiod av

= enheten har hittat GPS-satelliter

= söker GPS-signal

= laddning pågår

= i viloläge eller fulladdad

*Blinkar ingen lampa = enhet avstängd eller LED-lamporna avstängda*

## 3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.



I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet [www.posifoncare.se](http://www.posifoncare.se) och appen PosifonCare. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Loggar du in i webbgränssnittet och trycker på hjälp så finns kom igång guider och videos som kan stötta dig i läroprocessen.