



**Bruksanvisning**  
**Posifon Pico Pro**

## Paketinnehåll

1. Posifon Pico Pro
2. Micro USB laddkabel
3. Transformator



## Olika delar

1. På/Av & Ring-knapp
2. Röstmeddelande-knapp
3. Larmknapp
4. Mikrofon
5. LTE LED-lampa
6. GPS LED-lampa
7. Ström LED-lampa
8. Högtalare
9. Laddkontakter




## Extra tillbehör som finns utöver standard

- a. Laddstation
- b. Halsrem
- c. Karbinhake
- d. Väska för fäste runt armen/bälte
- e. Bältesclipper

## Kom igång

Pico Pro kan laddas på två sätt. Antingen via kabel eller laddstation som finns som tillbehör. Placera den magnetiska laddkabeln mot enhetens laddkontakter. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter för att laddning ska påbörjas.

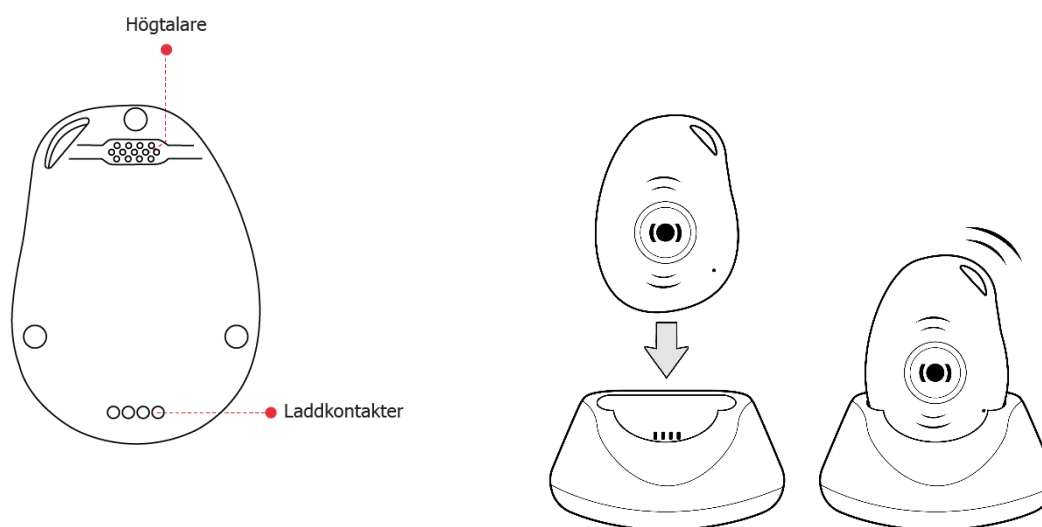

Vänligen ladda enheten minst 4 timmar innan första användning. När enheten laddar blinkar den röda LED-lampan långsamt var tredje sekund och den lyser med fast sken när den är fulladdad. Enheten laddar fullt på cirka 3 timmar.

Laddning skall endast ske vid behov och att låta sin Pico vara på laddning konstant kan försämra dess funktion. Uppstår det tillfällen då Pico inte används rekommenderar vi att stänga av enheten.

Batteritiden beror på hur aktiv användaren av Pico Pro är och vilka inställningar som är aktiverade. Standardinställningar är normalt att enheten uppdaterar sin position var tredje minut när användaren är i rörelse men intervallet kan ändras med hjälp av Posifons support. Batteritiden vid standardinställningar varierar därför mellan 2-5 dagar beroende på användarens aktivitetsnivå.

## Hantering av Posifon Pico Pro

Pico Pro startas genom att trycka på PÅ/AV-knappen i två sekunder. För att stänga av håll larmknappen- & på/av-knappen intryckt i två sekunder till dess att lamporna släcks och enheten vibrerar. Släpp därfter trycket för att återupprepa proceduren en gång till, då stängs enheten av.

## Förklaring av LED-lampor

### GRÖN LED:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Blinkar till snabbt varje sekund          | = samtal pågår                   |
| Blinkar till två gånger var tredje sekund | = ansluten till mobilnät         |
| Långsamma och långa blinkningar           | = söker mobilnät                 |
| Lyser med fast sken (blinkar ej)          | = inget eller felaktigt SIM-kort |

### BLÅ LED:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Dubbelblinkar snabbt var tredje sekund | = enheten har hittat GPS-satelliter |
| Långsamma och långa blinkningar        | = söker GPS-signal                  |

### RÖD LED:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Blinkar var tredje sekund          | = Laddning pågår          |
| Blinkar två gånger varje 3e sekund | = Ansluten till Bluetooth |
| Fast sken                          | = Fulladdad               |

## Att larma från enheten

Tryck och håll i larm-knappen i tre sekunder. När ett pip ljud hörs och enheten vibrerar så börjar enheten att ta sin position och kopplar upp ett samtal till valda larmmottagare om detta är inlagt samt att larm skickas via tex push-notis till appen eller som SMS.

Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Vänligen kontakta Posifons support. Enheten kan ringa upp till tio nummer sekventiellt efter varandra.

## Att ringa till enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Pico Pro.

Genom att ringa det numret så kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt men användaren kan också själv svara direkt genom att trycka på larm-knappen.

Om du inte kan ringa enheten så finns det några saker som vi vill att ni dubbelkollar:

1. Är enheten på och har mobiltäckning?
2. Har ni skrivit in rätt nummer? studera ert leveransbrev. Tänk på att det är ett utländskt nummer så ni måste ange + eller 00 framför numret.
3. Undersök om ni har någon spärr på abonnemanget för utlandssamtal.

Kontakta Posifons support så kan vi hjälpa er att felsöka.

## Att ringa från enheten

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Denna funktion kan du lägga till under brukarens profil i PosifonCare. Enheten kan ringa upp till 10 nummer sekventiellt efter varandra.

Viktigt att notera är att man inte måste programmera att enheten ska ringa ett eller flera nummer. När ett larm går så är det vanligt att den som hanterar larmet ringer upp brukaren. Vill man att larmknappen ska vara inaktiv så går det enkelt att ändra under larmtyper under larminställningar i PosifonCare.

För att ringa ett samtal utan att larma, tryck och håll nere på/av/ring-knappen i 3 sekunder. Du kommer att höra ett pip ljud, den gröna LED-lampan blinkar till två gånger och din Posifon Pico Pro kommer nu påbörja uppringning av telefonnummer 2 i den sekventiella listan. Om du vill avsluta samtalet trycker du på SOS-knappen.

Har du mottagit ett samtal från en Pico Pro-enhet på din telefon är det viktigt att du klickar på "1" på knappsatsen på din telefon innan du avslutar samtalet. Då bekräftar att du att samtalet är hanterat. Görs inte detta kommer en ny uppringning att ske.

## Aktivera fall-sensor

Vill du aktivera fallsensorn på Pico Pro, vänligen kontakta Posifons support så hjälper vi er med det. Fallsensorn kan ställas in i nio olika nivåer och det kan behövas finjusteras utefter användarens rörelsemönster. Standard är nivå tre och sedan kan känsligheten justeras därifrån. Viktigt att även aktivera larmtypen "Enheten har detekterat en fallolycka" i PosifonCare. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

## Aktivera höghastighetslarm

Vill du få larm när användaren förflyttar sig över en viss hastighet? Vänligen kontakta Posifons support så hjälper vi er med det. Hastigheten ställs in i km/h. Viktigt att även aktivera larmtypen "hög hastighet registrerad" i PosifonCare. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

## Larmtyper som stöds av Pico Pro

Det finns flera larmtyper som stöds av Pico Pro och nedan preciseras dessa. Tänk på att alla inte är standard så vissa behöver aktiveras separat i PosifonCare under Larminställningar och Mobila Larmtyper för att kunna dra nytta av funktionen.

|  |   |
|--|---|
| Områdeslarm, lämnar                                    | Andvändaren har lämnat det aktuella trygghetsområdet  |
| Områdeslarm, ankommer                                  | Andvändaren har ankommit i det aktuella trygghetsområdet  |
| Aktivt larm,<br>larmknapp nedtryckt                    | Andvändaren har tryckt på larmknappen   |
| Manuellt larm av larm-<br>mottagare, efter sökning     | Larmmottagare har konstaterat att användaren bör uppsökas, detta efter en sökning   |
| PosifonCare har ej haft<br>kontakt med GPS-enhet       | Enhet har inte kommunicerat med PosifonCare på angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm kan indikera på att något är fel och ska tas på största allvar |
| Enheten är åter aktiv<br>efter inaktivitetslarm utlöst | Enhet åter aktiv efter inaktivitetslarm   |
| GPS-enhet har lågt batteri                             | Batterinivån på enhet är under bestämd nivå. Enhet behöver laddas   |
| GPS-enhet har stängts av                               | Enhet avstängd, på grund av lågt batteri  |
| GPS-enhet har slagits på                               | Enhet är igång  |
| Enheten har detekterat ett fall                        | Enhet med fallsensor har detekterat ett fall  |
| Hög hastighet registrerad                              | Enhet färdas över förbestämd hastighet  |
| Ett rörelselarm har utlösts                            | Enhet i rörelse vid kontroll  |

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INBYGGT BATTERI

- Försök inte att byta ut ditt Pico Pro batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din Pico Pro med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

## Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämja med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011

## Hårdvaruspecifikation

Storlek: 61mm x 44mm x 16mm

Vikt: 40g

Batteri: Laddningsbart, 3.7V 850mAh

Strömkälla: 5V DC

Mobilnätskommunikation, 2G, 3G, 4G.

GPS Chip: uBlox MAX M8 (AGPS support)

Fixtid mot GPS: Aktiv 1s, Varm 5s, Kall 15s

GPS-känslighet: Varm -148dBm, Kall -162dBm

WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4G

Bluetooth: BT5.0 LE

Drifttemperatur: -20°C till +60°C

Luftfuktighet: 5% till 95% Ej-kondenserande

Standby: 72 timmar (under normala miljöförhållanden)

Minne: Inbyggt 1Mb flash

IP class: IP67, vattentät

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din Pico Pro.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Pico Pro.
- Placera inte Pico Pro i en diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.
- Utsätt inte Pico Pro för extremt höga eller låga temperaturer.
- Använd inte Pico Pro i bastun eller ångbastun.
- Lämna inte din Pico Pro i direkt solljus under en längre tid.
- Placera inte din Pico Pro nära öppen eld.
- Släng inte din Pico Pro i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär Pico Pro, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med Pico Pro. Små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.



## Övrigt:

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

Vid rengöring, torka av med fuktig trasa. Det går att använda på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedel i måttlig mängd, se viktiga säkerhetsanvisningar.

## Kontakt:

Posifon AB  
Adress:

Sven Hultins Gata 9C,  
412 58 Göteborg

Hemsida:  
Tel. support:  
Mail support:

[www.posifon.se](http://www.posifon.se)  
031 360 87 70 (dagtid 8.00–17.00)  
[support@posifon.se](mailto:support@posifon.se)