



k e r u v e


Bruksanvisning

KOMPONENTER

GPS-enhet

Keruve finnes i forskjellige versjoner og utførelsesformer. I eksempelet under vises enheten som en klokke.


Klokke

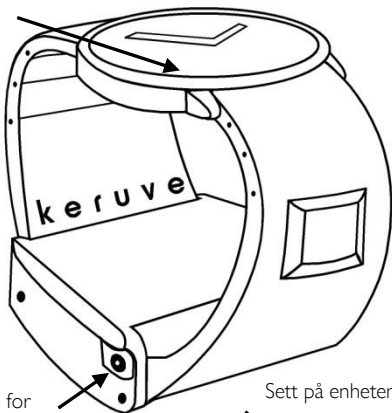


Kontakt for
batterilading

Sett på enheten med
spesialverktøyet som
følger med.


Lade- og
statusindikator-
lampe

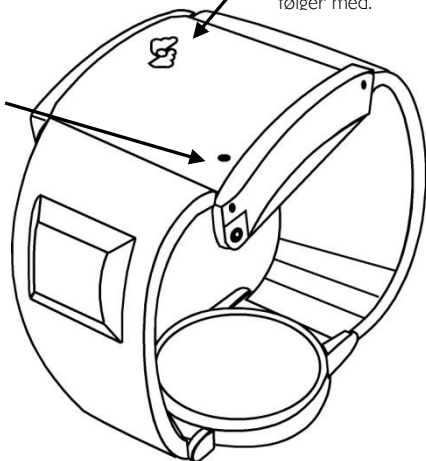

Batteriladere

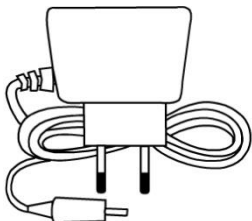


Lader til GPS

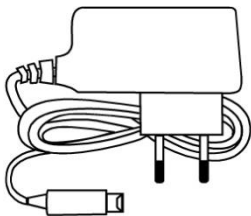

Lader til pårørende-enhet

Spesialverktøy

Magnet til å sette på GPS-enheten samt gjøre en reset

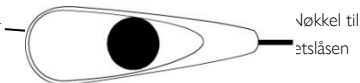

Økkel til
åtslåsen

Har dere valgt et låsbart armbånd til gummiarmbåndet, følger det med et lignende tilbehør med tre små pinner på langsiden av verktøyet i stedet.

SIM-kort

Både pårørende-enheten og GPS-enheten har SIM-kort installert på forhånd slik at de kan kommunisere med hverandre. Kostnaden for SIM-kort og trafikkavgifter er inkludert i Posifons månedsavgift ved tiltenkt bruk.


HÅNTERING AV GPS-enhet

Lading

Sett GPS-laderen i enheten og så i stikkontakten. Kontroller at ladeindikatoren lyser. Det tar cirka 4-5 timer å lade batteriet fullt.

Når batteriet er fulladet slokker ladeindikatoren og batterinivået på pårørende-enhetens bildeskjerm oppdateres, med mindre pårørende-enheten er slått på. Selvsagt oppdateres også batteriindikatoren i appen eller på internettportalen.

Justering av armbånd

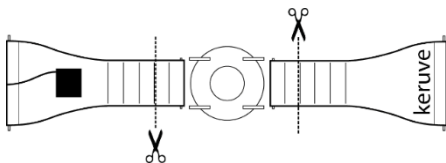

Gummiarmbånd

Begge sidene av armbåndet bør kortes av like mye. Skjer/klipp langs sporene på undersiden av armbåndet, på den smale delen nærmest klokken (se bilde). Mål gjerne omkretsen på brukerens håndledd før dere klipper, for å sikre at det ikke blir for lite.

Lærarmbånd

Åpner sprinten nærmest uret med verktøyet som følger med og justerer armbåndet ved å føre sprinten inn i et annet hull (markert med en rød søm).

Sette klokken på armen

Plasser klokken på brukerens håndledd. Avhengig av hvilket armbånd dere bruker gjøres dette på ulike måter. Med et låsbart armbånd eller lærarmbånd trykker man sammen de to armbåndsdelene. Benyttes et gummiarmbånd med en spenne som kan åpnes, lukker man også armbåndet på samme måte som en vanlig klokke med metallspenne.



Åpne sikkerhetslåsen

Gummiarmband

Et låsbart gummiarmbånd åpnes ved hjelp av spesialverktøyets tre pinner som føres inn i de tre hullene i armbåndet. Det åpningsbare armbåndet har en vanlig metallenke som åpnes likt som en vanlig klokke med metallspenne.

Lærarmbånd

Låsbar lærarmbånd har et lite hull på den ene siden av armbåndet. Der finnes det et tydelig skille mellom de to armbåndene. Før spesialverktøyet som følger med inn i hullet, trykk litt lett og dra fra hverandre. Se venstre bilde nedenfor. Det åpningsbare armbåndet åpnes ved at du trykker med tommelen på området som tydelig skiller de to armbåndsdelenene. Se høyre bilde nedenfor.

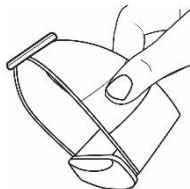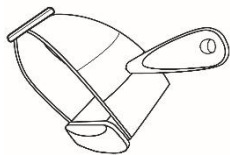

Belteenhet

Åpnes lettest ved å føre spesialverktøyet inn i et av fire hull på enhetens side.

Starte GPS-enheten

Om statusindikatoren ikke blinker betyr dette at klokkeenheten er avslått. Vær nøye med å sjekke at statusindikatoren blinker (hvert 3. sekund) etter at du tar ut laderen, for å sikre at enheten er på.

1. Plasser magneten på nøkkelen over logoen i cirka 4 sekunder til statusindikatoren begynner å blinke. Enheten startes også når laderen føres inn.

2. Fjern nøkkelen så snart lampen begynner å blinke.

Vil dere kunne slå av enheten så kontakt support.

Ikke oppbevar klokken i en håndveske, ryggsekk eller nære metallgjenstander når den er startet. Dekk den heller ikke med metallgjenstander. Dette kan forstyrre klokkes funksjon.

Blinkende statusindikator

Når GPS-enheten er slått på blinker statusindikatoren, som er en rød liten lampe. I begynnelsen, når enheten startes, blinker lampen hurtig. Når den har koblet seg til mobilnettet begynner den å blinke hvert 3. sekund. Blinker den litt raskere (hvert 1,5 sekund) holder den på å ta en posisjon. Dersom indikatorlampen begynner å blinke saktere (hvert 6. sekund) indikerer dette at enheten ikke er koblet til mobilnettet og derfor ikke kan sende opplysninger om posisjon.

Dersom GPS-enheten ikke har mobildekning i løpet av en 10 minutters periode, skrus den automatisk av i 15 minutter for å spare batteri. Deretter starter den igjen automatisk og forsøker å koble til mobilnettet.

Bruk av PosifonCare

Varselsmottakning og konfigurering av GPS-enhetens funksjoner gjøres i PosifonCare. Se mer informasjon om dette i separat materiale.

Ved problemer

Dersom enheten ikke fungerer som den skal, Prøv å gjøre en reset ved å sette laderen i enheten.

Keruve GPS-enhet

- Størrelse og vekt: 38 x 45 x 16 mm / 36g
- Standby tid: 3,5 dager

Keruve Pårørendeenhhet

- Størrelse og vekt: 144 x 82,5 x 19 mm / 141g
- Standby tid: 2 dager.

Hurtigguide

Vær nøye med å sjekke at statusindikatoren blinker hvert 3. sekund etter at du har tatt ut laderen.

Starte GPS-enheten ved å sette i laderen eller plassere magneten på nøkkelen over logoen på elektronikkenheten i cirka to sekunder, til statusindikatoren begynner å blinke.

Når indikatorlampen blinker hvert 3. sekund har GPS-enheten mobildekning. Blinker indikatorlampen litt raskere, hvert 1,5 sekund, prøver enheten å ta en posisjon. Dersom indikatorlampen lyser kan den ikke koble seg til mobilnettet, og blinker indikatorlampen hvert 6. sekund så har den ikke mobildekning.

GPS-enheten har opp til 3.5 dagers standby tid. Lade enheten i 5 timer for å sikre at den er fulladet.

Kontakt

Posifon AB

Hjemmeside: www.posifon.se

Tel support: +46 31 360 8770

Mail support: support@posifon.se

CE 168