



# Bruksanvisning

## Posifon Nano 4G

Posifon Nano 4G är ett mobilt trygghetslarm som kan bäras som ett armbandsur eller på annat valfritt sätt. Enheten fungerar bra både inomhus och utomhus där det finns mobiltäckning. Posifon Nano 4G tillsammans med tjänsten PosifonCare är designad för att öka användarens frihet, trygghet och självständighet. Den kan användas för olika ändamål och ställas in efter specifika önskemål.

I bruksanvisningen får du information om hur du hanterar enheten, så som laddning, funktioner, hur man larmar och allmän skötsel.

Denna bruksanvisning ger enhetsspecifik information om din produkt. Innan skarpt användande uppmanar vi användarna att också läsa bruksanvisningen för tillhörande IT-systemet PosifonCare.

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning och följ beskrivna riktlinjer. Underlåtenhet att göra det kan innebära potentiell hälsofara eller produktfel.

## Paketinnehåll

1. Posifon Nano
2. Laddkabel
3. Transformator



## Olika delar

1. PÅ/AV knapp
2. LTE LED-lampa
3. GPS LED-lampa
4. Mikrofon
5. Larmknapp
6. Högtalare
7. Laddkontakt




## Extra tillbehör som finns utöver standard

- Låsbart spänne

## Kom igång

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. Se bild nedan. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter.

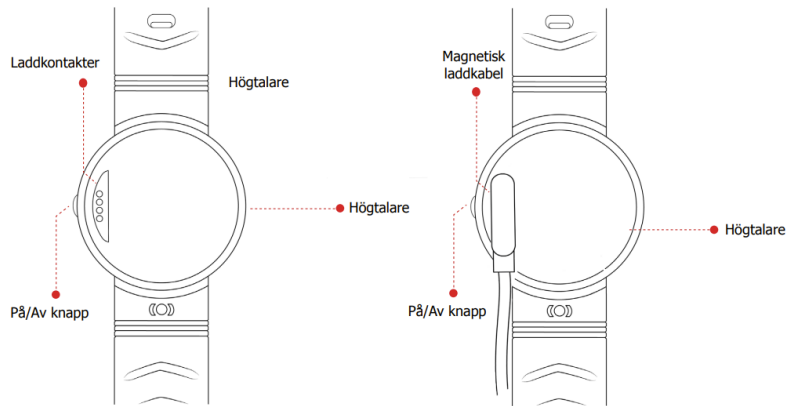

Vänligen ladda enheten minst 4 timmar innan första användning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampnan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Se bild ovan.

Enheter laddar fullt på ungefär 2 timmar.

- STARTA enheten genom att trycka på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder. Trycker du på PÅ/AV knappen när enheten är PÅ så stänger du av LED-lamporna.
- STÄNG AV enheten genom att trycka på PÅ/AV-knappen intryckt i 12 sekunder tills dess du känner en vibration och lamporna släcks.

## LED-lampans betydelse

### GRÖN LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= ansluten till mobil-nätet
Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund	= ansluten till mobil-nätet över data
Långsamma och långa blinkningar	= söker mobil-nätet
Lyser med till fast sken (blinkar ej)	= inget eller felaktigt SIM-kort

### BLÅ LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= enheten har hittat GPS-satelliter
Långsamma och långa blinkningar	= söker GPS-signal
Lyser med fast sken	= laddning pågår
Lysdiod av	= i viloläge eller fulladdad

*Blinkar ingen LED-lampa = enhet avstängd, alternativt är LED-lamporna avstängda - tryck på PÅ/AV för att starta enheten och LED-lamporna.*

## Att ringa till enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Posifon Nano 4G. Genom att ringa det numret kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt men användaren kan också själv svara genom att trycka på larmknappen. Genom att trycka på larmknappen under pågående samtal avslutas samtalet.

Ska enbart ett fåtal personer kunna ringa enheten eller ingen alls? Kontakta Posifons support så kan vi ställa in det för er.

Om du inte kan ringa enheten så finns det några saker som vi vill att ni dubbelkollar:

1. Är enheten på och har mobiltäckning?
2. Har ni skrivit in rätt nummer? Studera ert leveransbrev. Är det ett utländskt nummer måste ni ange + framför numret.
3. Får ni ringa utländska samtal från er telefon? Undersök om ni har någon spärr på abonnemanget för utlandssamtal.

Kontakta Posifons support så kan vi hjälpa er att felsöka.

## Att larma

Tryck och håll i larm-knappen i 1.5 sekund. När enheten börjar vibrera har enheten registrerat att du tryckt på larmknappen. Därefter säger en röst "larm aktiverat". Då börjar enheten ta sin position och kopplar upp ett samtal till valda larmmottagare om detta är inlagt, samt att larm skickas via tex push-notis till appen eller som SMS.

Önskar du justera tiden att hålla ned i larmknappen, kontakta Posifons support så hjälper vi er att korta ner denna tid.

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Denna funktion kan du lägga till under brukarens profil i PosifonCare. Enheten kan ringa upp till 10 stycken nummer sekventiellt efter varandra. Fastnar samtal i telefonsvararen kan Posifons support korta ner tiden som nummer rings upp och på så sätt minska risken att samtalen går till telefonsvararen.

Tryck på nr "1" på din telefons knappsats innan du avslutar ett samtal. På så vis bekräftas att samtalet är hanterat. Om samtalet inte är bekräftat hanterat rings ytterligare ett samtal upp.

Viktigt att notera är att man inte måste programmera att enheten ska ringa ett eller flera nummer. När ett larm går är det vanligt att den som hanterar larmet ringer upp brukaren.

## Ljud- och mikrofonvolym

Går att justera så den passar brukarens och larmmottagarens behov, vänligen kontakta Posifons support så hjälper vi er med det.

## Aktivera fall-sensor

Vill du aktivera fallsensorn, denna funktion kan du lägga till under brukarens profil i PosifonCare under övriga larminställningar. Fallsensorn kan ställas in i 9 olika nivåer (1-9), där 1 är känsligast, det kan behövas finjusteras utefter brukarens rörelsemönster. Standardvärdet är nivå 3 och sedan kan känsligheten justeras därifrån. Viktigt att även aktivera larmtypen fall under larmtyper på antingen avdelningen eller brukaren beroende på om brukarspecifika inställningar är aktiverade eller ej. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

## Aktivera höghastighetslarm

Vill du få larm när brukare förflyttar sig över en viss hastighet? Kontakta Posifons support så hjälper vi er med det. Hastigheten ställs in i km/h. Viktigt att även aktivera larmtypen höghastighetslarm under larmtyper på antingen avdelningen eller brukaren beroende på om brukarspecifika inställningar är aktiverade eller ej. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

## Larmtyper som stöds av Nano 4G

Det finns flera larmtyper som stöds av Nano och nedan preciseras dessa. Tänk på att alla inte är standard så vissa behöver man aktivera separat med hjälp av Posifon samt under Larminställningar och Mobila Larmtyper för att kunna dra nytta av funktionen. Man behöver inte för den delen använda alla heller. Är du osäker, kontakta Posifons support så guidar vi dig.

Områdeslarm, lämnar	Brukaren har lämnat det aktuella trygghetsområdet
Områdeslarm, ankommer	Brukaren har ankommit i det aktuella trygghetsområdet
Aktivt larm, larmknapp nedtryckt	Brukaren har tryckt på larmknappen
Manuellt larm av larm- mottagare, efter sökning	Larmmottagare har konstaterat att brukare bör uppsökas, detta efter en sökning
PosifonCare har ej haft kontakt med GPS-enhet	Enhet har inte kommunicerat med Posifon- Care på angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm, kan indikera på att något är fel
GPS-enhet har lågt batteri	Batterinivån på enhet är under bestämd nivå. Enhet behöver laddas
Enheten har detekterat fall	Enhet med fallsensor har detekterat fall


Hög hastighet registrerad

Enhet färdas över förbestämd hastighet


## Monteringsanvisning låsbart spänne (tillbehör)

Guide hur man öppnar och monterar det låsbara spännet till Posifon Nano 4G:

Öppna:

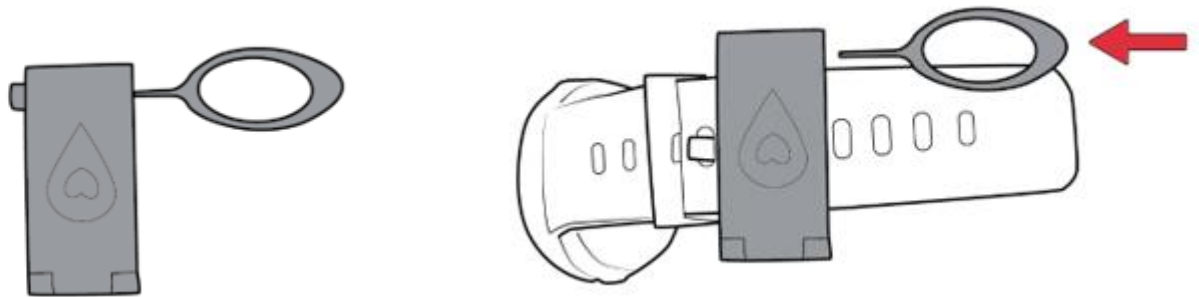

Placering, ju närmare spännet du fäster låsspännet desto svårare att ta av sig enheten. I det flesta fall är det inga problem att lämna ett hål som mellanrum i armbandet. Bilden nedan visar hur du låser spännet:

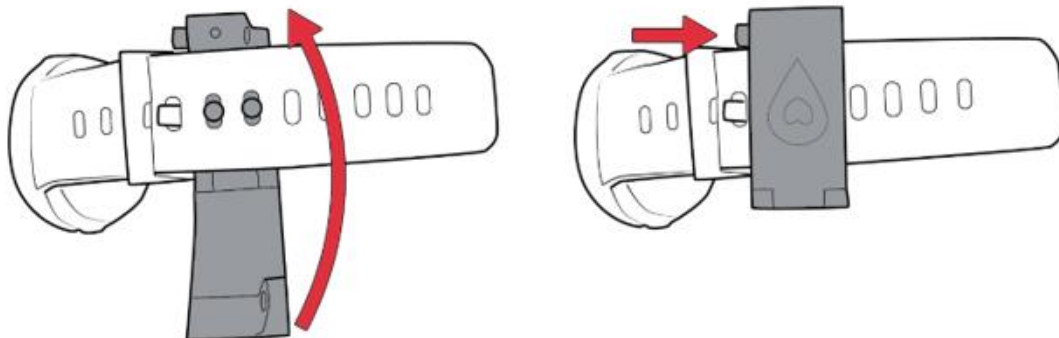

## Hårdvaruspecifikation

Storlek	47 mm x 41 mm x 16 mm
Vikt	60g
Batteri	600mAh Litium polymer
Frekvensband	900/1900MHz, LTE B1/B3/B7/B8/B20
Strömkälla	5V DC
Drifttemperatur	-20°C till +70°C
Fixtid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 5s, Kallstart 15s
Standby	120 timmar (om ej i rörelse)
IP class	IP67
WiFi	2.4GHZ 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE4.0 BR/EDR

## Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Posifon Nano.
- Placera inte din Nano nära öppen eld.
- Släng inte din Nano i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär Nano, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med Nano. De små komponenterna kan vara en kvävningrisk för ditt barn.

## Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt Posifon Nano-batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din Nano med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

## Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser. Batteriet i Posifon Nano 4G är inbyggt och får ej avlägsnas.

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för information om vad som gäller för inlämning och återvinning.

## Rengöring och rekonditionering:

Vid rengöring, torka av med fuktig trasa. Det går att använda på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedel i måttlig mängd, se viktiga säkerhetsanvisningar. Vid rekonditionering så rekommenderar vi att man byter armband på enheten.

## Övrigt:

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

## Kontakt:

Adress: Posifon AB  
Sven Hultins Gata 9C,  
412 58 Göteborg

Hemsida: [www.posifon.se](http://www.posifon.se)  
Tel. support: 031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)  
Mail support: [support@posifon.se](mailto:support@posifon.se)

