

Hurtigstart guide Posifon Pico



1. Lade din Posifon Pico

Plassere Pico i ladestasjonen som følger med. Når enheten er korrekt plassert og ladingen starter vil enheten vibrere lett. Et lyssignal vises på enhetens overside og på ladestasjonen når enheten lades.

2. Sørg for at Posifon Pico er PÅ

Posifon Pico har to LED-lamper på siden av enheten. Se under hva de ulike kombinasjonene av lyssignaler betyr. Dersom ingen av LED-lampene blinker er enheten avslått. Trykk på knappen på siden av enheten for å starte enheten.



3. Logg inn via nettleser eller i appen på din SmartPhone.

I brevet som følger leveransen finner du innloggingsopplysninger til systemet www.posifoncare.se og appen PosifonCare. Appen finnes både til Android og iPhone - telefoner. Søk på PosifonCare i Google Play eller App Store for å finne den. Via appen kan du spore brukeren, samt håndtere varsler. Via webgrensesnittet kan du i tillegg gjøre de innstillingene som ønskes. Dette kan gjøres fra ulike datamaskiner så lenge riktige innloggingsopplysninger benyttes.

Guide Pico LED-lamper:

Grønn LED:

Blinker raskt hvert 3. sekund	=koblet til GSM-nettet
Blinker to ganger raskt hvert 3. sekund	= koblet via GPRS
Langsomme og lange blink	= søker GSM-nettet
Lyser med jevnt lys (blinker ikke)	= ingen eller feil SIM-kort

Blå LED:

Blinker raskt hvert 3. sekund	= enhet har kontakt med GPS satellitter
Langsomme og lange blink	= søker GPS satellitter
Lyser med jevnt lys	= lading pågår
Lysdiode av	= i hvilemodus eller fulladet (om lading pågår)

Ingen lampe blinker = Enhet avslått