



Bruksanvisning

Posifon Pico

Pakkens innhold

1. Posifon Pico
2. Micro USB ladekabel
3. Ladestasjon (tilbehør)



Forskjellige deler

1. På/Av & Ringe-knapp
2. USB ladeport
3. Alarmknapp (SOS)
4. Mikrofon
5. GSM LED lampe
6. GPS LED lampe
7. Høytalere
8. Ladekontakter



Forklaring av LED-lamper

GRØNN LED:

Blinker raskt hvert 3. sekund

Blinker to ganger raskt hvert 3. sekund

Langsomme og lange blink

Lyser med jevnt lys (blinker ikke)

= koblet til GSM-nettet

= Koblet til GPRS-nettet

= Søker GSM-nettet

= Ingen eller feil SIM-kort

BLÅ LED:

Blinker raskt hvert 3. sekund

Langsomme og lange blink

Lyser med jevnt lys

Lysdiode av

= enheten har funnet GPS-satelliter

= søker GPS-signal

= lading pågår

= i hvilemodus eller fulladet

Å ringe til enheten

På brevet som er vedlagt i leveransen står det hvilket telefonnummer det er til din Posifon Pico. Ved å ringe det nummeret kommer enheten til å spille en melodi slik at brukeren av enheten hører at noen ringer. Etter noen sekunder kommer enheten til å svare automatisk, men brukeren kan også svare selv ved å trykke på alarmknappen. Ved å trykke på alarmknappen under pågående samtale avsluttes samtalen.


Hvordan varsler man?

Trykk og hold alarmknappen nede i 3 sekunder. Når du hører en pipelyd og kjenner en vibrasjon begynner enheten å finne sin posisjon og koble til en samtale til valgte varselsmottakere. Ved å trykke på alarmknappen under pågående samtale avsluttes samtalen.

Lade Posifon Pico

Posifon Pico kan lades på to måter. Enten via kabel eller via ladestasjon, dersom man har valgt å kjøpe denne i tillegg. Lader man via kabel så åpner man opp den lille luken på siden av enheten og fester kabelen riktig vei. Velger man å lade enheten via ladestasjonen så fører man helt enkelt inn MiniFinder i ladestasjonen. Sørg imidlertid for å føre den inn hele veien til de hører en liten klikkelyd eller kjenner at enheten vibrerer litt.

Batteritiden avhenger av hvor aktiv brukeren av Pico er og hvilke innstillinger man velger å aktivere. Posifon Pico har nemlig bevegelsessensor innebygget som kjenner når brukeren rører seg og da aktiveres alle funksjoner. Batteritiden varierer derfor fra noen dager til cirka tre uker.

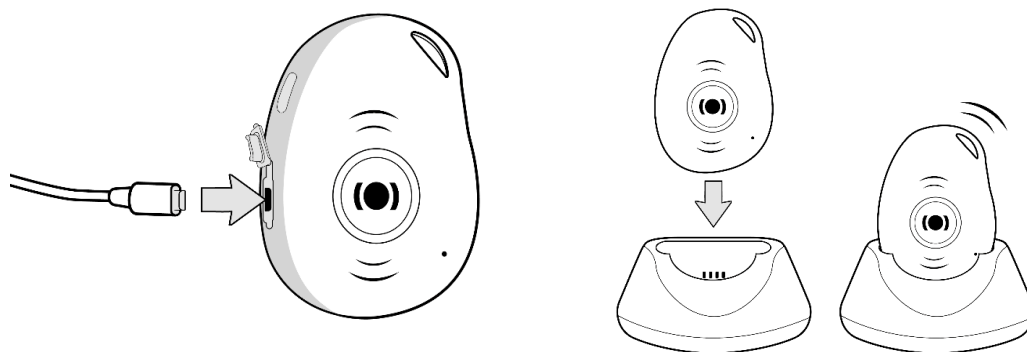

Håndtering av Posifon Pico

Posifon Pico startes ved at man trykker og holder sideknappen på enheten inne, se bilde under *forskjellige deler* på side 2, Pil (1). For å skru av, trykk på sideknappen (1) og Alarmknappen (3) samtidig, til enheten vibrerer og lampene slukkes.

Hardware-spesifikasjon

Størrelse	60mm x 41mm x 16mm
Vekt	35g
Batteri	900mAh Li-ion, oppladingsbart
Frekvensbånd for GSM	850/1900mhz 900/1800MHz
Ladespenning	Micro USB, DC 4.2V~5.5/400mA
Drifttemperatur	-20°C till +65°C
Fikstid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 35s, Kaldstart 45s
GPS-sensitivitet	-158dB
Energiforbruk	45mA standby
GPS chip	u-Blox 7 (Swiss Made)
Standby	Opp til 20 dager (om ikke i bevegelse)
Memory	Innebygget 8Mb flash
IP class	IP66

Sikkerhetsdeklarasjon

Denne utrustningen har blitt testet for å være i overensstemmelse med sikkerhetsinnpass i henhold til spesifikasjonene i EN standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les disse instruksjonene
- Behold disse instruksjonene
- Les alle advarsler
- Følg alle instruksjoner
- Ikke åpne enheten. Emnene i dette produktet og/eller batterier, kan skade miljøet og/eller menneskers helse om den håndteres på feil måte.
- Ikke tukle med din Pico.
- Bruk ikke slipende rengjøringsmiddel for å rengjøre din Pico.
- Ikke plasser din Pico nære åpen ild.
- Ikke kast din Pico i en brann. Batteriet kan eksplodere!
- Ikke prøv å plukke fra hverandre Pico. Den inneholder ikke utbyttbare komponenter.
La aldri barn under 3 år leke med din Pico. De små komponentene kan utgjøre en kvelingsrisiko for barnet ditt.

Forsiktighetstiltak for innebygget batteri

- Ikke prøv å bytte batteriet på din Pico. Det er innebygget og kan ikke byttes ut.
- Lade batteriet i henhold til de instruksjoner som følger i denne guiden.
- Bruk kun CE-sertifiserte ladere for å lade batteriet.
- Lade din Pico ved hjelp av en sertifisert datamaskin, hub eller strømforsyning.
- Ikke prøv å åpne det innebygde batteriet med tvang.

Informasjon om gjenvinning



Symbolet på produktet eller dens forpakning betyr at dette produktet må kastes separat fra vanlig husholdningssøppel ved slutten av dets livslengde. Vennligst vær bevisst på det er ditt ansvar å kaste elektronisk utrustning på gjenvinningsentraler for å bidra til å bevare naturressurser.

Øvrig:

Det er ikke lov å skrive krenkende eller konfidensiell informasjon i fritekstfeltene i PosifonCare.

Kontakt:

Posifon AB

Hjemmeside:

www.posifon.se

Tel support:

+46 31 360 8770

Mail support:

support@posifon.se

