


## Hurtigstart guide Posifon GPS SmartSole

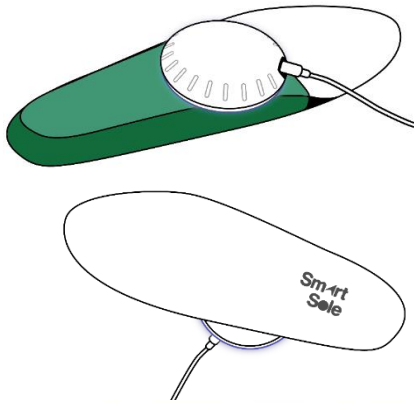

### 1. Lade din Posifon GPS SmartSole

Koble inn USB-kabelen i ladeplattformen og i strømadapteren. Sett så adapteren i en passende stikkontakt. Legg SmartSole på plattformen og matche lade-symbolet på GPS SmartSoles underside med ladeplattformens midtpunkt. Når LED-lampen rundt laderen endrer farge til blå, lader SmartSole. Lyser den grønt, lader den ikke. Når SmartSole har ladet i 30 sekunder så slukker LED-lampen. Det tar cirka fire timer å lade GPS SmartSole fullt dersom batteriet har vært utladet.

### 2. Logge inn via webleseren eller i appen på din SmartPhone.



I brevet som følger leveransen finner du innloggingsopplysninger til systemet [www.posifoncare.se](http://www.posifoncare.se) og appen PosifonCare. Appen finnes både til Android og iPhone - telefoner. Søk på PosifonCare i Google Play eller App Store for å finne den. Via appen kan du spore brukeren, samt håndtere varsler. Via webgrensesnittet kan du i tillegg gjøre de innstillingene som ønskes. Dette kan gjøres fra ulike datamaskiner så lenge riktige innloggingsopplysninger benyttes.

### 3. Vekke Posifon GPS SmartSole



Rist den høyre sålen lett i noen sekunder og plasser den på et sted der sålen har fri sikt mot himmelen. Innen cirka et minutt kommer sålen til å meddele sin posisjon. Starte sporing i appen eller via internettportalen for å se posisjonene.

*Sørg for å avslutte steg en til tre før du begynner med steg fire. Etter at dere har klippet og tilpasset sålens størrelse kan dere ikke angre kjøpet deres.*

### 4. Tilpasse Posifon GPS SmartSole



Ta ut begge sålene i nåværende sko og bruk disse som en mal. Legg respektiv såle oppå GPS SmartSole og bruk en penn for å markere hvordan dere skal klippe GPS SmartSole for beste passform. Tenk på at dere bare skal klippe i framsiden ved tærne, se bildet til venstre.

*Ikke klipp i den grønne delen av sålen rundt helen og i buen under foten!*