



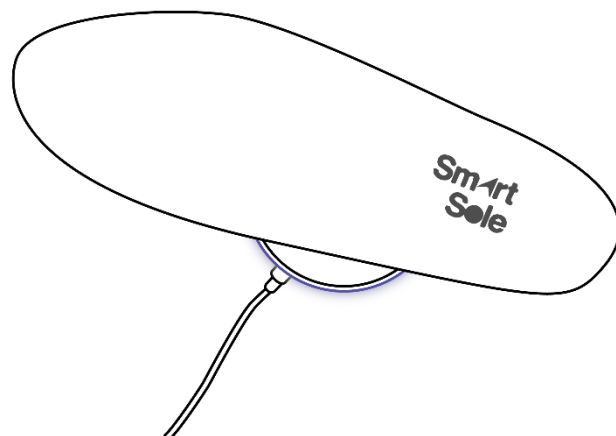

# Bruksanvisning Posifon SmartSole

## Lade din Posifon GPS SmartSole

Koble USB-kabelen til ladeplattformen og i strømadapteren. Sett så adapteren i en passende stikkontakt. Legg SmartSole på plattformen og matche lade-symbolet på GPS-SmartSoles underside med ladeplattformens midtpunkt. Når LED-lampen rundt laderen endrer farge til blå, lader SmartSole. Lyser den grønt lader den ikke. Når SmartSole har ladet i 30 sekunder slukker LED-lampen.

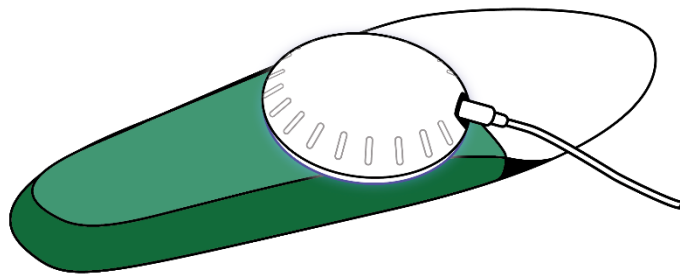

Synes du det er vanskelig å balansere SmartSole oppå den runde laderen? Prøv å snu SmartSole og laderen opp ned som på bilde til venstre. Prøv deg frem til du finner det som fungerer best for deg. Bare husk at SmartSole lader først når LED-lampen lyser blått, eller når lampen er slukket.

Det tar cirka fire timer å lade GPS SmartSole fullt om batteriet har vært utladet.

## Batteritid

Batteritiden avhenger av hvor mange posisjoner som tas. Med andre ord hvor mye du beveger deg. Det finnes en bevegelsessensor innebygget i sålene, som kjenner at man rører seg. Ligger sålen stille i seks minutter, går den inn i hvilemodus for å spare batteri. Du kan bruke sålen aktivt i cirka 16 timer. Standardinnstillingen er at sålen rapporterer posisjonen sin hvert femte minutt. Så dersom du bruker sålen en time om dagen, holder batteriet litt over en uke. Dersom man kjører mye bil, buss eller tog forkortes batteritiden. GPS-en noterer at du beveger på deg og tar posisjoner oftere.

## Vekke Posifon SmartSole

Første gangen sålen brukes bør du den i cirka fem sekunder, og plassere den et sted med fri sikt mot himmelen i noen minutter, til første posisjon er sendt til appen eller internettportalen. Deretter kan du bruke sålen i skoene dine.

Dersom sålen har vært inaktiv i flere dager kan det ta lengre tid å få den første posisjonen. Vet man at dette er tilfellet anbefaler vi å følge instruksjonene ovenfor om man ønsker en posisjon raskt.

## Tilpasse Posifon SmartSole etter dine sko



Ikke klipp i sålene før dere har besluttet å beholde sålen. Når dere har klippet i sålen kan dere ikke lenger angre kjøpet deres. Før dere klipper i sålen, sørg for at sålens bredde passer skoene dine. I noen tilfeller kan sålen være bredere enn skoene, og bredden kan du dessverre ikke tilpasse.

For å lettest tilpasse sålene etter skoene dine, anbefaler vi at du tar ut sålene fra dine nåværende sko og legger de over GPS SmartSole. Bruk en penn for å tegne en linje der du skal klippe GPS SmartSole for beste passform. Tenk på at det kun er den fremre delen av sålen som kan klippes. Se bilde. Den grønne delen ved sålens underside ved helen, samt buen under foten må ikke klippes. Dersom det skjer gjelder ikke garantien.

## Lurt å tenke på

Ikke klipp i sålene før dere har besluttet å beholde dem. Når dere har klippet i sålene, kan dere ikke lenger angre kjøpet deres.

GPS SmartSole startes automatisk ved bevegelse. Dersom sålen ikke har blitt brukt på noen dager kan det være lurt å riste sålen i noen sekunder, og plassere den på et sted med fri sikt mot himmelen i cirka et minutt.

Batteritiden avhenger av hvor aktivt sålen brukes. Sålen klarer cirka 16 timers aktivt bruk. Bruker man sålen en time hver dag holder batteritiden over en uke.

Det tar cirka 2 timer å lade opp et utladet batteri. Ladeplattformen gir fra seg et signal når GPS SmartSole er fulladet.

Det er ikke lov å skrive noe krenkende eller konfidensiell informasjon i noen av fritekstfeltene i PosifonCare.

## Garanti

Posifon gir ett års garanti på GPS SmartSole og alle tilbehør, dersom det ikke har blitt avtalt noe annet. Denne garantien trer i kraft ved innkjøpsdato og gjelder ett år frem i tid. Deler eller enheter som leveres som erstatning er enten nye, eller har tilsvarende standard som nye deler.

## Kontakt:

Posifon AB

Hjemmeside:

Tel support:

Mail support:

[www.posifon.se](http://www.posifon.se)

+46 31 360 8770

[support@posifon.se](mailto:support@posifon.se)

