

# Snabbstart guide Posifon Pico Pro



## 1. Ladda din Posifon Pico Pro

Placera Posifon Pico i medföljande laddstation. När enheten är korrekt placerad och laddningen påbörjas så kommer enheten vibrera lite lätt. En ljussignal visas på enhetens ovansida och på laddstationen att enheten laddar. Även ett röstmeddelande om att laddning pågår levereras.

## 2. Se till att Posifon Pico Pro är PÅ

Pico Pro har tre LED-lampor på enhetens sida. Se nedan vad de olika kombinationerna av ljussignaler innebär. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd. Tryck på knappen på enhetens sida för att starta enheten.



## 3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet [www.posifoncare.se](http://www.posifoncare.se) och appen PosifonCare v2. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Detta kan göras från olika datorer så länge rätt inloggningsuppgifter används.

### Guide Pico Pro LED-lampor:

#### Grön LED:

Blinkar två gånger var tredje sekund  
Blinkar snabbt varje sekund  
Långsamma och långa blinkningar  
Lyser med fast sken (blinkar ej)

= ansluten till mobilnät  
= samtal pågår  
= söker mobilnät  
= inget eller felaktigt SIM-kort

#### Blå LED:

Blinkar två gånger var tredje sekund  
Blinkar en gång var tredje sekund

= enhet har kontakt med GPS satelliter  
= söker GPS satelliter

#### Röd LED:

Blinkar långsamt  
Fast sken

= Laddning pågår  
= Fulladdad