


Snabbstart guide Posifon Nano 4G

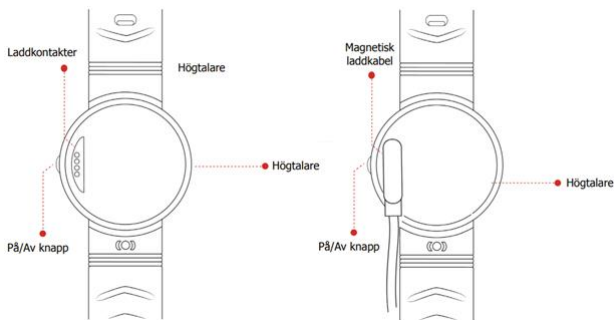

1. Ladda din Posifon Nano 4G

Placera den magnetiska laddkabeln mot enhetens laddkontakter för att påbörja laddning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Enheten laddar fullt på ungefär två timmar.

2. Innan användning, se till att Posifon Nano 4G är PÅ

Posifon Nano 4G har två LED-lampor på enhetens ovansida. Se nedan vad de olika kombinationerna av ljussignaler innebär. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd eller LED-lamporna avstängda. Tryck på knappen på enhetens sida (PÅ/AV-knappen) för att starta enheten och dess LED-lampor.

Guide Nano LED-lampor:

Grön LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

= ansluten till mobilnätet

Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund

= ansluten till mobilnätet över data

Långsamma och långa blinkningar

= söker mobilnät

Lyser med till fast sken (blinkar ej)

= inget eller felaktigt SIM-kort

Blå LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

= enheten har hittat GPS-satelliter

Långsamma och långa blinkningar

= söker GPS-signal

Lyser med fast sken

= laddning pågår

Lysdiod av

= i viloläge eller fulladdad

Blinkar ingen lampa = enhet avstängd eller LED-lamporna avstängda

3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.



I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet www.posifoncare.se och appen PosifonCare v2. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Loggar du in i webbgränssnittet och trycker på hjälp så finns kom igång guider och videos som kan stötta dig i läroprocessen.

Posifon AB
Sven Hultins Gata 9C
412 58 Göteborg

Växel: 031 360 8770
support@posifon.se
www.posifon.se