



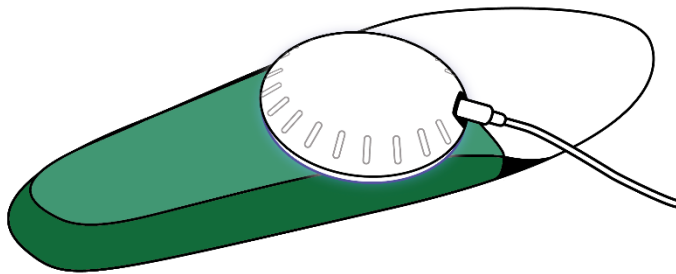

Bruksanvisning

Ladda din Posifon GPS SmartSole

Koppla in USB-kabeln i laddningsplattan och i strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag. Lägg SmartSole på plattan och matcha ladd-symbolen på GPS SmartSoles undersida med laddningsplattans mittpunkt. När LED-lampan runt laddaren ändrar färg till blå färg så laddar SmartSole, lyser den grönt så laddar den inte. När SmartSole laddat i 30 sekunder så slocknar LED-lampan.

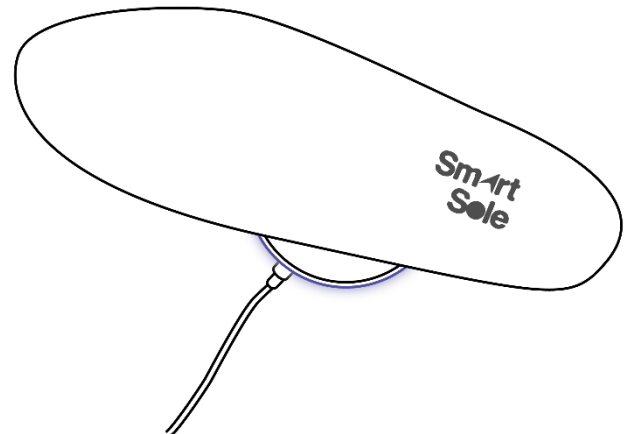

Tycker du det är svårt att balansera SmartSole ovanpå den runda laddaren. Testa då att vända SmartSole och laddaren upp-och-ned som bilden till vänster. Testa dig fram vad som fungerar bäst för dig. Tänk bara på att SmartSole laddar först när LED-lampan lyser blått eller när lampan är släckt.

Det tar ungefär fyra timmar att ladda GPS SmartSole fullt om batteriet har varit urladdat.

Batteritid

Batteritiden beror på hur många positioner som tas, med andra ord hur mycket du rör på dig. Det finns en rörelsesensor inbyggd i sulorna som känner av att man rör sig. Ligger sulan still i sex minuter så går den in i ett viloläge för att spara batteri. Du kan använda sulan aktivt i ungefär 16 timmar. Standardinställningar är att sulan rapporterar sin position var femte minut. Så använder du sulan någon timma om dagen håller batteriet en bra bit mer än en vecka. Åker man mycket bil, buss eller tåg så kortas batteritiden. GPSen noterar att du rör på dig och tar positioner oftare.

Väcka Posifon SmartSole

Första gången sulan används så bör du skaka sulan i cirka fem sekunder och placera den på ett ställe där den har fri sikt mot himlen i några minuter tills första positionen har skickats till appen eller internetportalen. Därefter kan du använda sulan i dina skor.

Om sulan varit inaktiv i flera dagar kan det ta längre tid att få den första positionen. Vet man med sig att så är fallet rekommenderar vi att följa instruktionerna ovan om man snabbt vill ha position.

Anpassa Posifon SmartSole efter dina skor



Klipp inte i sulorna innan ni har beslutat att behålla sulan. När ni har klippt i sulan så kan ni inte längre ångra ert köp. Innan ni klipper i sulan se även till att sulans bredd passar dina skor. I vissa fall kan sulan vara bredare än skorna och bredden kan du tyvärr inte anpassa.

För att lättast anpassa sulorna efter dina skor rekommenderar vi att du tar ut sulorna från dina nuvarande skor och lägger ovanpå GPS SmartSole. Använd en penna för att rita en linje hur ni ska klippa GPS SmartSole för bäst passform. Tänk på att det är enbart den främre delen av sulan som kan klippas, se bilden. Den gröna delen vid sulans undersida vid hälen och hålfoten får inte klippas. Om det sker utgår ingen garanti.

Bra att tänka på

Klipp inte i sulorna innan ni har beslutat att behålla sulan. När ni har klippt i sulan så kan ni inte längre ångra ert köp.

GPS SmartSole startas automatiskt vid rörelse. Har inte sulan används på några dagar kan det vara bra att skaka sulan i några sekunder och placera den på ett ställe med fri sikt mot himmelen i någon minut.

Batteritiden beror på hur aktivt sulan används. Sulan klarar ungefär 16 timmars aktivt användande. Använder man sulan i någon timma per dag så räcker batteritiden en bra bit över en vecka.

Det tar ungefär 2 timmar att ladda upp ett urladdat batteri. Laddningsplattan ger ifrån sig en signal när GPS SmartSole är fulladdad.

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i någon av fritextfälten i PosifonCare.

Garanti

Posifon lämnar ett års garanti på GPS SmartSole och alla tillbehör om inget annat överenskommit. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller ett år framåt. Delar eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i prestanda med nya delar.

Kontakt:

Posifon AB

Adress: Sven Hultins Gata 9C,
412 58 Göteborg
Hemsida: www.posifon.se
Tel. support: 031 360 75 24
(dagtid 8.00–17.00)
Mail support: support@posifon.se

