


## Snabbstart guide Posifon GPS SmartSole



### 1. Ladda din Posifon GPS SmartSole

Koppla in USB-kabeln i laddningsplattan och i strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag. Lägg SmartSole på plattan och matcha laddsymbolen på GPS SmartSoles undersida med laddningsplattans mittpunkt. När LED-lampan runt laddaren ändrar färg till blå färg så laddar SmartSole, lyser den grönt så laddar den inte. När SmartSole laddat i 30 sekunder så slocknar LED-lampan. Det tar ungefär fyra timmar att ladda GPS SmartSole fullt om batteriet har varit urladdat.

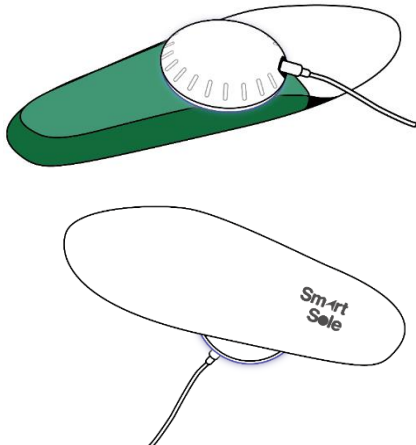

### 2. Logga in appen i din SmartPhone eller på internetportalen.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter för att ansluta till internetportalen [www.posifoncare.se](http://www.posifoncare.se). På leveransbrevet finner du även uppgifterna du behöver för logga in via en app på din SmartPhone. Appen finns till Android och iPhone (lanseras under Oktober -18) telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store.



### 3. Väck Posifon GPS SmartSole

Skaka den högra sulan lite lätt i några sekunder och placera den på ett ställe så att sulan har fri sikt mot himlen. Inom någon minut kommer sulan att meddela sin position. Starta en sökning i appen eller via internetportalen för att se positionerna.

*Se till att slutföra steg ett till tre innan du börjar med steg fyra. Efter att ni klippt och anpassat sulans storlek kan ni inte ångra ert köp.*



### 4. Anpassa Posifon GPS SmartSole

Ta ut båda sulor i nuvarande skor och använd de som en mall. Lägg respektive sula ovanpå GPS smartsole och använd en penna för att rista in hur ni skall klippa GPS SmartSole för bästa passform. Tänk på att ni ska bara klippa i framdelen vid tårna, se bilden till vänster.

*Klipp inte i den gröna delen av sulan runt hälen och hålfoten!*