


# Bruksanvisning

## Multi drogtest

Ta ur testet från förpackningen. Se även till att datumet för sista användningsdag inte överskridit. Testet är fukt känsligt och ska vara förpackat fram till användande. Se till att teststicken och urinprovet uppnått rumstemperatur (15-30 ° C) före testning.

1. Ta ut drogtestet från förpackningen och använd den ganska omgående då testerna fukt känsliga. Ta av locket och doppa remsornas ändrar i urinprovet i minst 10-15 sekunder. Det röda fältet på remsorna ska inte doppas ned.
2. Sätt tillbaka locket på testet.
3. Placera testpanelen på en icke-absorberande, plan yta, ta tiden och vänta tills den röda linjen/linjerna framträder. Resultatet ska kontrolleras efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 15 minuter.

### Negativt Resultat:

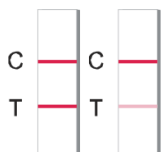

Två röda linjer syns i avläsningsfönstret: En testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som bekräftar att tillräcklig mängd vätska sugits upp till provet. Styrkan på testlinjen kan variera och vara svagare eller starkare än kontrollinjen.

### Positivt Resultat



Endast en röd linje uppstår i kontrollområdet (C). Frånvaron av en linje i testområdet (T) indikerar ett positivt resultat för drogen i fråga. Låt **8** minuter passera innan testet förklaras positivt. OBS! Testet ger endast preliminärt resultat. Verifiera positiva resultat hos ackrediterat laboratorium.

### Ogiltigt Resultat



Kontrollinje saknas. Otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat eller för gammalt test eller inkorrekt testprocedur är mest sannolika skäl för utebliven kontrollinje. Gå igenom testrutinerna igen och upprepa med nytt test.