

ITREMOR MOUSE

ANVÄNDARHANDBOK



FUNKTIONER

- Mjukvara som filtrerar skakningar
- Passar nästan alla datormöss
- Lösning för ofrivilliga vänster- eller högerklick
- Kan enkelt justeras för olika grader av skakningar
- Mjukvaruboxen placeras mellan mus och enhet

MÅLGRUPPEN

Användare som har utmaningar
med att använda en datormus
på grund av skakningar

VEM ÄR TKS?

"Med välfärdsteknologin som centrum är det vårt mål att skapa en större frihet i vardagen för personer som lider av invalidiserande sjukdomar. Och detta för att skapa en betydande förbättring av deras livskvalitet" - Søren Mørch, VD.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Introduktion - sida 2
- Installation - sida 2
- Anpassning - sida 2
- Garanti - sida 2
- Vad ingår / Kontakta oss - sida 3

Itremor Mouse är en mjukvarumodul som filtrerar bort skakningar som påverkar muspekaren på datorn. Därmed får personer som lider av skakningar möjligheten att använda en datormus utan att störas av skakningarna.

Hjälpmidlet är en box som placeras mellan datorn och datormusen via USB. All mjukvara finns i boxen och därför behöver man alltså bara en fungerande USB-port på datorenheten. Boxen har två funktioner:

Vridknappen justerar i vilken grad mjukvaran filtrerar bort skakningar.

Den andra knappen används för att slå av / på höger- och vänsterklick. Denna funktion är för dem som okontrollerat råkar trycka på musens höger- och vänsterknapp.

INTRODUKTION

Denna manual beskriver installation och användning av Itremor Mouse. Läs denna manual innan produkten tas i bruk för att försäkra dig om en korrekt installation och användning.

INSTALLATION

Man ansluter Itremor-boxen mellan mus och datorenhet på ett enkelt sätt via USB. Första gången som Itremor Mouse ansluts till datorn installeras det automatiskt en drivrutin vid internetåtkomst. Man kan även installera drivrutinen manuellt genom att ladda ner den från www.tks-technology.dk/support.

ANPASSNING

För att kalibrera musen enligt användarens skakningar ska användaren hålla sin hand på musen och låta den skaka naturligt. Sedan justerar man med vridknappen tills markören på skärmen står stilla. Boxen är nu anpassad enligt användarens aktuella behov och användaren kan flytta markören utan större störningar.

Det är möjligt att ångra höger- / vänsterklick vid oavsiktligt klick. Detta görs genom att man drar kontakten åt vänster. Kom ihåg att ansluta externa knappar för användning av vänster- / högerklick.

OBS: Om vridknappen står mot höger bottenläge är modulen inaktiv och musen i standardläge.

GARANTI

IDet ges 2 års garanti från fakturadatum.

Garantin täcker endast användning enligt manualen och inga synliga tecken på felaktig användning.

Förvaring

Temp.: 0 - 45 °C

Tryck: 80 - 110 kPa

Fuktighet: 15 - 95%

Brister eller skador

Upptäcker man brister eller skador på produkten ska man kontakta sin lokala återförsäljare eller TKS.

Avyttring

Produkten ska avyttras som elektroniskt avfall på en återvinningsstation. Släng inte produkten med hushållsavfallet eftersom den är skadlig för miljön.

VAD INGÅR?

För TKS är det viktigt att tillhandahålla en hög servicenivå och se till att användaren får bästa möjliga nytta av Itremor Mouse. Därför har vi även inkluderat service och hjälp i priset.

PRODUKT OCH SERVICE

- Itremor Mouse-boxen
- USB-kabel (in- och utgång)
- Teknisk service vid behov

FÖR KÖP

- Mus
- Knapp för externt högerklick
- Knapp för externt vänsterklick

HÄR KAN DU HITTA DET PÅ NÄTET



www.tks-technology.dk



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechology/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>

Hjælpemiddelbasen

<https://hmi-basen.dk/>



<https://youtu.be/ZIZNCraVchs>

KONTAKTA OSS



Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk

