

ITREMOR MOUSE



FUNKTIONER

- Software som filtrerer rystelser væk
- Egnede til computer mus
- Løsning til ufrivillige tryk på venstre og højre klik
- Kan nemt justeres til rystelser på mange niveauer
- Software boks sættes til mellem mus og enhed

MÅLGRUPPEN

Brugere som har udfordringer
med brug af en computer mus
på grund af tremor

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom. Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet."

Søren Mørch, CEO



HVAD ER ITREMOR MOUSE?

Itremor Mouse består af et modul, som indeholder software der bortfiltrerer rystelser med musemarkøren på computeren. Derved skabes der mulighed for at tremor-ramte igen kan bruge deres computermus uden at blive forstyrret af rystelserne.

Hjælpemidlet er en boks som sættes imellem computer og computermusen via usb. Alt software er i boksen og derfor skal der kun installeres en USB driver på computeren. Boksen har to funktioner: Drejeknappen justerer i hvor høj grad softwaren filtrerer rystelser. Den anden knap slår højre- og venstreklik til og fra. Denne funktion er til dem som ukontrolleret kommer til at trykke på musens højre- og venstreklik.

FORDELE VED ITREMOR MOUSE

Produktet gør en markant forskel for brugeren, da det i væsentlig grad letter den daglige tilværelse både i hjemmet, men også på arbejdspladsen. Brugere som helt eller delvist er blevet forhindret i at bruge en computermus, kan ved hjælp af Itremor Mouse, igen tage kontrol over computermusen og dermed computeren. Det vil sige at nogle brugere vil bruge markant mindre tid på at fumle med markøren. Andre som måske har opgivet, vil være i stand til igen at finde glæden ved at bruge en computermus.

- Skaber mulighed for at arbejde mere effektivt med en computer på arbejdspladsen og i hjemmet
- Skaber mulighed for igen at arbejde med en computer, hvis brugeren har været forhindret af tremor
- Hjælpemidlet er klar til brug – skal bare sættes til mellem mus og computer
- Passer til de fleste mus – ellers kan man i dialog med TKS finde en løsning

OPSÆTNING OG TILPASNING

ITremor boksen sættes nemt til ind imellem mus og computer via USB.

For at kalibrere musen til brugerens rystelser, holder brugeren sin hånd på musen og lader den ryste naturligt. Man justerer derefter på filtrere knappen, indtil markøren på skærmen står stille. Boksen er nu justeret til brugerens aktuelle behov og brugeren kan navigere markøren uden større forstyrrelser.

GØR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE MULIGT

Giver mulighed for at brugeren tager en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, fordi man ikke forhindres i at navigere en mus tilstrækkeligt.

TEKNISK HJÆLP HELE VEJEN

Itremor Mouse virker til næsten alle almindelige mus, men der kan også tilkøbes en. Hvis der er specifikke behov, er TKS klar til at indgå i dialog med både kommune og brugere, med henblik på at finde frem til en løsning som kan opfylde behovet.

TILPASSES BRUGERENS BEHOV

Knappen på boksen er nem at bruge. Brugeren kan let justere på kalibreringen, udfra de aktuelle behov. Den passer derfor godt til brugere som har forskellige niveauer af tremor i løbet af dagen.

GENBRUG

Når produktet ikke længere er aktuelt for brugeren kan Itremor boksen let videregives til andre med samme behov, da den er fleksibel og nem at tilpasse til forskellige brugere.

FRA TKS TIL BRUGEREN

Denne model skal ses, som en vejledning til hvordan forløbet er, fra kontakt med TKS til produktet er hos brugeren

Bevillingsproces

Brugeren søger om at få bevilget hjælpemidlet - Her kan det være fordelagtigt at finde ud af hvilken mus brugeren bruger

01

02

Godkendt

Brugeren får bevilget produktet og det bestilles via mail til TKS

Hjælpemidlet sendes ud

Itremor Mouse sendes ud og er klar til brug

03

04

Brugertilpasning

Brugeren justerer selv på Itremor Mouses kalibreringsknap. Kan nemt justeres til ændret behov, eksempelvis hvis rystelserne forandrer sig i løbet af dagen

Teknisk assistance

Hvis der skulle være nogle specielle behov i forhold til mus eller teknisk assistance vil TKS være behjælpelig med at finde en løsning, som kan opfylde brugerens behov

05

HVAD ER INKLUDERET?

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge Itremor Mouse og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

PRODUKT OG SERVICE

- Itremor mouse boks
- USB ledning (indgang og udgang)
- Teknisk service hvis nødvendigt

TILKØB

- Mus
- Knap til ekstern højreklik
- Knap til ekstern venstreklik

HER KAN DU FINDE DET ONLINE



www.tks-technology.dk



Facebook

<https://www.facebook.com/tksttechnology/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>

Hjælpemiddelbasen

<https://hmi-basen.dk/>



<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>

KONTAKT OS


Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk



ITONGUE

MÅLGRUPPEN
Personer der er
lammet men som har
god kontrol af
tungen

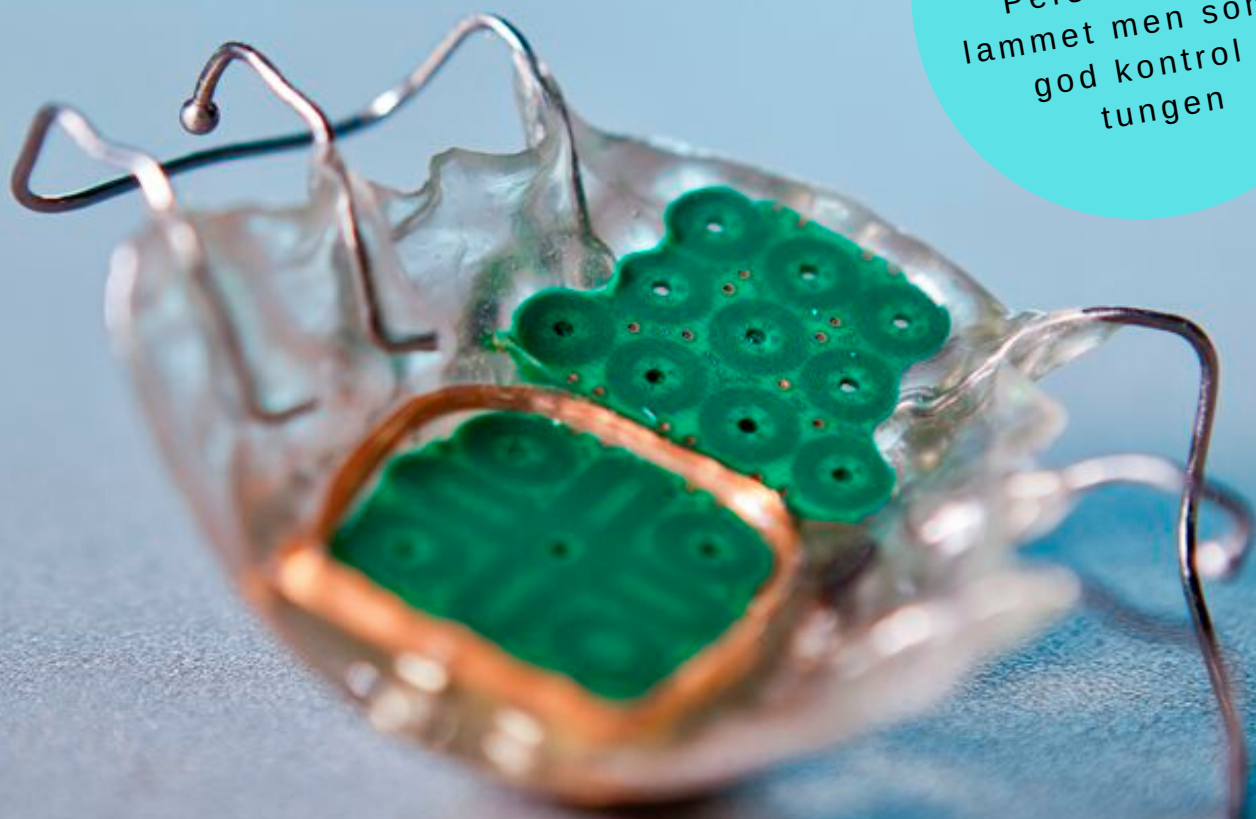

FUNKTIONER

- Trådløs kommunikation
- El-kørestolskontrol
- Brugertilpasning
- Stabilt styresystem
- Kommunikerer med elektroniske enheder via Bluetooth

Itongue er et styresystem der bæres i munden, som en ganebøjle.

Anvendes både til styring af elektrisk kørestol og til at kontrollere computer, smartphone samt smart-home produkter.

Itongue forbindes til andre enheder via en Bluetooth forbindelse.

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom.

Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet."

Søren Mørch, CEO



HVAD ER ITONGUE?

Ganebøjlen bliver specialtilpasset til brugeren. Den består af 18 sensorer, som brugeren trykker på, via en tungepiercing. Herved styres den funktion man har valgt, det kan eksempelvis være at skrive en besked eller at køre sin kørestol. I systemet er det let for brugeren at bestemme, hvilken funktion og enhed der styres.

Itongue hjælper brugeren med at få kontrollen tilbage i hverdagen.

Det bliver muligt for personer med mistet førlighed, selv at styre både den elektriske kørestol samt telefon, computer og smart-home produkter.

TKS er med fra produktafklaring til installation og oplæring. Det betyder at vi i tæt dialog finder frem til hvilke behov brugeren har og hvorledes Itongue kan løse dem. Ved valget af Itongue tager TKS sig af oplæringen, samt af supporten på produktet bagefter.



HVORFOR VÆLGE ITONGUE

Itongue gør en væsentlig forskel for brugeren i den daglige tilværelse, fordi det giver mulighed for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Det understøtter brugerens selvstændighed fordi det giver mulighed for selv at bevæge sig rundt, samt mulighed for selv at styre elektroniske enheder. Dermed opnår brugeren frihed til selv at udføre handlinger, der ellers normalt kræver hjælp fra andre.

Med Itongue kan man selv

- Skrive noter, mails og dokumenter
- Justere indstillinger på kørestolen
- Køre derhen hvor man vil
- Navigere i og skrive på sociale medier

Meget stabilt

Komplet styresystem

Let at forstå for hjælpere

Trådløs kommunikation

Nemt at placere

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE MULIGT

Giver mulighed for at brugeren tager en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, som følge af brugen af Itongue, fordi man selv kan anvende arbejdsredskaber, såsom en computer.

VIRKER MED BRUGERENS EGEN EL-KØRESTOL

Itongue systemet kan kobles sammen med brugerens nuværende kørestol, og man behøver derfor ikke en ny stol for at kunne anvende det. Systemet kan kobles sammen med 85% af alle kørestolsmodellernes styresystemer.

GENBRUG AF SYSTEMET

Når Itongue ikke længere er aktuelt for brugeren, kan dele af systemet genbruges. Det gælder både Kontrolenheden, Appen og Opladeren. Dermed er det billigere for kommunen at anskaffe systemet næste gang.

TIMER UDEN HJÆLP

På grund af den større selvstændighed som Itongue giver, er det muligt at have timer hver dag, hvor man er uden hjælp.


TILPASSES BRUGERENS BEHOV

I fælles dialog finder vi frem til hvilke funktioner der er relevante for den enkelte. Ganebøjle's sensorer kan tilpasses, så funktionerne passer til individuelle behov og bevægelighed. Dermed opnås den bedste funktionalitet for brugeren. Ændres brugerens behov, er der mulighed for tilpasning af ganebøjle's funktioner.

BRUG SMARTPHONE SOM SKÆRM PÅ STOLEN


Det er muligt at anvende en smartphone som den synlige skærm på el-kørestolen. Kontrolenheden gemmes da væk under stolen.

HVAD BESTÅR ITONGUE SYSTEMET AF?

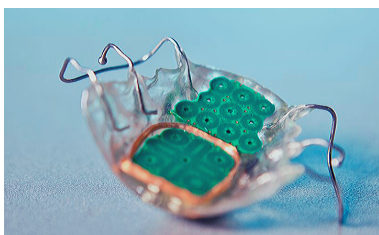

GANEBØJLE

Ganebøjlen laves specialtilpasset, efter en støbning af brugerens gane. Den har 18 sensorer, som aktiverer funktionerne med tryk fra tungepiercingen, brugertilpasning af punkterne er muligt. Ganebøjlen holder strøm til 24 timers fuld funktion.

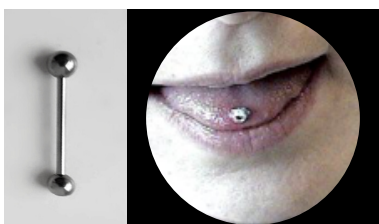

TUNGEPIERCING

Anvendes til at aktivere sensorerne i ganebøjlen, ved hjælp af tryk med tungens piercing. Piercing skal pierces i tungen ved en certificeret piercer.



KONTROLENHED

Omsætter input fra ganebøjlen til handling. Skærmen hvorpå menuen ses, her navigeres i funktionerne. Hvis man slukker Kontrolenheden vil ganebøjlen gå i dvale efter en time. Kan indstilles til forskellige sprog.



OPLADER

Ganebøjlen lades op ved at blive lagt ovenpå opladeren. Opladerens stik sættes i stikkontakten.



ICTRL APP

Kan styre kørestolen og betjene samme funktioner som ganebøjlen. Gør det muligt at anvende smartphonen som den synlige skærm på kørestolen, i stedet for Kontrolenheden. Appen betjenes med fingeren på egen smartphone.

FØR PRODUKTET VISITERES

Test brugerens tungebevægelighed

Ved afklaring, er det vigtigt at teste brugerens tungebevægelighed, fordi tungen skal kunne bevæge sig frem og tilbage i munden, for at det er muligt at trykke på sensorerne på ganebøjlen.

NÅR PRODUKTET LAVES

TKS er med hele vejen, fra afklaring af om Itongue er det relevante hjælpemiddel, til det kommer i brug hos brugeren. Det skyldes at vi vil hjælpe med at skabe de bedste forudsætninger for brugeren og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

Støbning til ganebøjlen

Brugeren går til egen tandlæge og får lavet en almindelig støbning af ganen, som sendes til TKS. Denne støbning bruges til at lave en modellering af ganebøjlen, sådan at den passer op i brugerens gane.

Når brugeren skal have lavet sin piercing

Bruger skal selv få lavet piercingen i tungen, dette gøres eksempelvis ved den lokale piercer, men vær opmærksom på at vælge et sted med høj hygiejne og certificeringer. Man kan opleve irritation og lidt hævelse i op til 4 dage efter piercing.

NÅR PRODUKTET BRUGES

Ved brug skal brugeren være opmærksom på:

- Ganebøjlen skal tages ud når brugeren spiser
- Ganebøjlen kan påvirke tydeligheden af ens tale
- Kan anvendes trådløst i for eksempel kørestol og seng
- Muligt at anvende mens man ligger ned
- Produktet kan gå i stykker, det er teknologi som skal behandles med respekt

SERVICE ER INKLUDERET

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge Itongue. Derfor hjælper vi i opstartsfasen både med afklaringen af behovet for produktet og med at afklare hvilke funktioner brugeren skal have. Når aftalen er indgået laver vi produktet og sætter systemet op hos brugeren, vi oplærer brugeren i det og følger efterfølgende op på hvordan det går med at bruge systemet.

Når systemet skal sættes op hos brugeren, kommer TKS på hjemmebesøg for at installere det, brugeren introduceres og trænes i brugen af produktet. Efter besøget skal de selv træne i at bruge det, for at få bedre færdigheder. Ved spørgsmål eller problemer hjælper vi selvfølgelig. Vi følger op på hvordan det går med at bruge produktet efter knap 2 uger samt igen efter 3 måneder.

Både service og hele Itongue systemet er en del af prisen og som det ses herunder, også inklusiv afklarende møder, udarbejdelse af produktet samt opfølgninger på brugen af produktet efter brugen er startet. Antallet af timer varierer og afhænger af den individuelle brugers behov. Nedenstående er derfor et estimat af den gennemsnitlige service og tages stilling til fra bruger til bruger:

- Introduktionsmøde med kommune og bruger: Møde omkring forventninger og brug - 2 timer
- Opsætning hos bruger: Installering af systemet samt introduktion og træning - 3 timer
- 1. opfølgning, ca 14 dage efter opsætningen: Evaluering af behov samt tilpasning - 2 timer
- 2. opfølgning, ca 3 måneder efter opsætningen: Feedback og eventuelle ændringer - 1 time

FRA TKS TIL BRUGEREN

Denne model skal ses, som en vejledning til hvordan forløbet er, fra kontakt med TKS til produktet er hos brugeren



HER KAN DU FINDE ITONGUE ONLINE



www.tks-technology.dk

Hjælpe-middel-basen.dk

<https://hmi-basen.dk/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/>



Facebook

<https://www.facebook.com/tkstechnology/>



<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>

KONTAKT OS

Søren Mørch

+45 60 68 84 68

sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe

www.tks-technology.dk



IHANDLE



FUNKTIONER

- El-kørestolskontrol
- Brugertilpasning
- Stabilt styresystem
- trådløs kommunikation med elektroniske enheder via Bluetooth

MÅLGRUPPEN

Personer med nedsat bevægelighed og styrke i arme og fingre.
Eksempelvis personer med muskelsvind

Ihandle holdes i hånden og er et ledningsfrit styresystem. Det kan anvendes både til styring af den elektriske kørestol og til at kontrollere computer, smartphone samt smart-home produkter. Det giver større bevægelsesfrihed for armen og den kan bl.a. placeres på skødet eller under et tæppe. Ihandle forbindes til produkter via en Bluetooth forbindelse.

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom. Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet."

Søren Mørch, CEO



HVAD ER IHANDLE?

Ihandle er et håndholdt og ledningsfrit joystick, derfor kan det eksempelvis holdes i skødet, så hænder forbliver varme. Det er muligt at specialtilpasse hvordan det placeres i hånden.

Ihandle har sensorer på overfladen, som brugeren trykker på, via en pegepind på fingeren. Herved styres den funktion man har valgt, det kan eksempelvis være at skrive en besked eller at styre sin kørestol. I systemet er det let for brugeren at bestemme, hvilken funktion og enhed der styres.

Ihandle hjælper brugeren med at få kontrollen tilbage i hverdagen.

Det bliver muligt for personer med mistet førlighed, nemt selv at skrive tekst samt at styre computeren og den elektriske kørestol samt smart-home produkter.

TKS er med fra produktafklaring til installation og oplæring. Det betyder at vi i tæt dialog finder frem til hvilke behov brugeren har og hvorledes Ihandle kan løse dem. Ved valget af Ihandle tager TKS sig af oplæringen, samt af supporten på produktet bagefter.

HVORFOR VÆLGE IHANDLE

Ihandle gør en væsentlig forskel for brugeren i den daglige tilværelse, fordi det giver mulighed for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Det understøtter brugerens selvstændighed fordi det giver mulighed for selv at styre elektroniske enheder samt mulighed for selv at bevæge sig rundt. Dermed opnår brugeren frihed til selv at udføre handlinger, der ellers normalt kræver hjælp fra andre.

Med Ihandle kan man selv

- Skrive noter, mails og dokumenter
- Justere indstillinger på kørestolen
- Køre derhen hvor man vil
- Navigere i og skrive på sociale medier

Meget stabilt

Komplet styresystem

Let at forstå for hjælpere

Trådløs kommunikation

Nemt at placere

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE MULIGT

Giver mulighed for at brugeren tager en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, som følge af brugen af Ihandle, fordi man selv kan anvende arbejdsredskaber, såsom en computer.

VIRKER MED BRUGERENS EGEN EL-KØRESTOL

Ihandle systemet kan kobles sammen med brugerens nuværende kørestol, og man behøver derfor ikke en ny stol for at kunne anvende det. Systemet kan kobles sammen med 85% af alle kørestolsmodellernes styresystemer.

GENBRUG AF SYSTEMET

Når Ihandle ikke længere er aktuelt for brugeren, kan dele af systemet genbruges. Det gælder både Kontrolenheden, Appen og Opladeren samt nogen gange Ihandle delen. Dermed er det billigere for kommunen at anskaffe systemet næste gang.

BRUG SMARTPHONE SOM SKÆRM PÅ STOLEN

Det er muligt at anvende en smartphone som den synlige skærm på el-kørestolen. Kontrolenheden gemmes da væk under stolen.

FLERE TIMER UDEN HJÆLP

Ihandle gør det muligt at have flere timer hver dag hvor man er uden en hjælp, fordi man selv kan gøre nogle af de ting hjælperen plejer.

TILPASSES BRUGERENS BEHOV

I fælles dialog finder vi frem til hvilke funktioner der er relevante for den enkelte. Ihandles sensorer kan tilpasses, så funktionerne passer til individuelle behov og bevægelighed. Dermed opnås den bedste funktionalitet for brugeren. Ændres brugerens behov, er der mulighed for tilpasning af funktionerne.

OPTIMALT AT FÅ IHANDLE TIDLIGT

Brugeren får meget ud af at få Ihandle tidligt. Fordi det gør det muligt fortsat at anvende Ihandle og dets funktioner når, når ens muskelstyrke er kraftigt aftaget, fordi man da bevarer denne muskelbevægelighed.

HVAD BESTÅR IHANDLE SYSTEMET AF?



IHANDLE HÅNDSTYKKE OG PEGEPIND

Ihandle er et håndholdt, ledningsfrit joystick. Det har 18 sensorer, som aktiverer funktionerne med tryk fra en pegepind, det er muligt at brugertilpasse punkterne.

Ihandle kan laves specialtilpasset til brugerens hånd, ved at tage et aftryk af brugerens hånd, som Ihandle sættes i.

Ihandle holder strøm til 24 timers fuld funktion.



KONTROLENHED

Omsætter input fra Ihandle til handling.

Skærmen hvorpå menuen ses, her navigeres i funktionerne.

Hvis man slukker Kontrolenheden vil Ihandle gå i dvale efter en time. Kan indstilles til forskellige sprog.



OPLADER

Ihandle oplades ved at blive tilsluttet et 5v stik, som sættes i stikkontakten.



ICTRL APP

Kan styre kørestolen og betjene samme funktioner som Ihandle.

Gør det muligt at anvende smartphonen som den synlige skærm på kørestolen, i stedet for Kontrolenheden.

Appen betjenes med fingeren på egen smartphone.

FØR PRODUKTET VISITERES

Test brugerens fingerbevægelighed

Ved afklaring, er det vigtigt at teste brugerens fingerbevægelighed. Fordi fingeren skal kunne bevæge sig frem og tilbage eller op og ned, for at det er muligt at trykke på sensorerne med pegepinden mod lhandle håndstykket.

NÅR PRODUKTET LAVES

TKS er med hele vejen, fra afklaring af om lhandle er det relevante hjælpemiddel, til det kommer i brug hos brugeren. Det skyldes at vi vil hjælpe med at skabe de bedste forudsætninger for brugeren og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

Muligt at tilpasse hvordan lhandle holdes i hånden

lhandle håndstykket kan sidde i hånden som brugeren ønsker det og holdes fast i hånden ved hjælp af den løsning, som passer den enkelte. Eksempelvis via en ring om en finger eller vi et håndstøbt aftryk. lhandle kan vendes i hånden som det passer den enkelte. Dette betyder også at vi kan tilpasses håndstykkets placering i hånden til hvilken finder der anvendes.

Støbningen af brugerens hånd

Vælger man en løsning med en håndstøbning, lave TKS en almindelig støbning af hånden. lhandle håndstykket placeres i denne støbning som det er aftalt med brugeren.

NÅR PRODUKTET BRUGES

Ved brug skal brugeren være opmærksom på:

- Kan anvendes både i kørestol og seng
- Muligt at anvende mens man ligger ned
- Produktet kan gå i stykker, det er teknologi som skal behandles med respekt

SERVICE ER INKLUDERET

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge lhandle. Derfor hjælper vi i opstartsfasen både med afklaringen af behovet for produktet og med at afklare hvilke funktioner brugeren skal have. Når aftalen er indgået laver vi produktet og sætter systemet op hos brugeren. Vi oplærer brugeren i det og følger efterfølgende op på hvordan det går med at bruge systemet.

Når systemet skal sættes op hos brugeren, kommer TKS på hjemmebesøg for at installerer det, brugeren introduceres og trænes i brugen af produktet. Efter besøget skal de selv træne i at bruge det, for at få bedre færdigheder. Ved spørgsmål eller problemer hjælper vi selvfølgelig. Vi følger op på hvordan det går med at bruge produktet efter knap 2 uger og efter ca. 3 måneder.

Både service og hele lhandle systemet er en del af prisen og som det ses herunder, også inklusiv afklarende møder, udarbejdelse af produktet samt opfølgninger på brugen af produktet og tilpasning efterfølgende. Antallet af timer varierer og afhænger af den individuelle brugers behov. Nedenstående er derfor et estimat af den gennemsnitlige service:

- Introduktionsmøde med kommune og bruger: Møde omkring forventninger og brug - 2 timer
- Opsætning hos kunden: Installering af systemet samt introduktion og træning - 3 timer
- 1. opfølgning, ca. 14 dage efter opsætningen: Evaluering af behov samt tilpasning - 2 timer
- 2. opfølgning, ca. 3 måneder efter opsætningen: Feedback og eventuelle ændringer - 1 time

FRA TKS TIL BRUGEREN

Denne model skal ses, som en vejledning til hvordan forløbet er, fra kontakt med TKS til produktet er hos brugeren



HER KAN DU FINDE IHANDLE ONLINE


www.tks-technology.dk

Hjælpemiddelbasen.dk
<https://hmi-basen.dk/>


LinkedIn
<https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/about/>


Facebook
<https://www.facebook.com/tkstechnology/>

 YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>

KONTAKT OS

Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tk-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk



ITREMOR



FUNKTIONER

- Sikrer at ufrivillige bevægelser fra joystick ikke konverteres til kraftige ryk i el-kørestolen
- Egnet til el-kørestole
- Specialtilpasses til individuelle behov

MÅLGRUPPEN

El-kørestolsbrugere som lider af spasmer eller andre former for uhensigtsmæssige rystelser

HVEM ER TKS

"Med velfærdsteknologi, som omdrejningspunkt, er vores formål at skabe større frihed i hverdagen for borgere ramt af en invaliderende sygdom. Dette med henblik på at skabe en væsentlig forøgelse af deres livskvalitet."

Søren Mørch, CEO



HVAD ER ITREMOR?

Itremor er en boks som indeholder software, der filtrerer rystelser væk og dermed sørger for at el-kørestolsbrugere kører mere lineært og sikkert.

Itremor er derfor med til at skabe mere sikkerhed for brugeren, men også omgivelserne, da det mindsker risikoen for at brugeren støder ind i andre personer eller objekter, på grund af pludselige bevægelser.

Systemet kan installeres på de fleste el-kørestole. TKS hjælper med at installere og tilpasse systemet til den individuelle bruger.



FORDELE VED ITREMOR

Itremor gør en markant forskel for brugeren af el-kørestolen og omgivelserne, da Itremor skaber mere sikkerhed omkring brugeren. Derfor skal brugeren ikke tænke på hvordan rystelserne påvirker omgivelserne omkring dem, men blot fokusere på, at køre hen til den ønskede destination. Hjælpemidlet bliver en integreret del af kørestolen efter installation og er derfor nem at tilvænne sig.

- Mere kontrollerede bevægelser
- Øget sikkerhed for brugeren
- Øget sikkerhed for omgivelserne

OPSÆTNING OG TILPASNING

Itremor boksen installeres af TKS eller en partner og placeres, så den ikke forstyrrer andre funktioner. Efterfølgende vil vi sørge for at softwaren kalibreres til de bevægelser brugeren har. Efterfølgende vil TKS følge op på om alt er som det skal være, eller om der er behov for yderligere tiltag. I tæt dialog vil vi finde frem til den bedste løsning for brugeren.

MERE FRIHED OG FÆRRE ULYKKER

Itremor, vil sørge for at brugerens pludselige bevægelser ikke påvirker navigationen af kørestolen, i samme grad som før.

GENBRUG

Når produktet ikke længere er aktuelt for brugeren, kan Itremor pilles af kørestolen og bruges et andet sted. Hjælpemidlet skal dog kalibreres, så den passer til den nye bruger.

VIRKER PÅ EGEN EL-KØRESTOL

Itemor kan kobles sammen med brugerens nuværende kørestol, og man behøver derfor ikke en ny stol for at kunne anvende det.

TEKNISK HJÆLP HELE VEJEN

Hvis der er nogle specifikke behov, er TKS klar til at indgå i dialog med både kommune og brugere med henblik på at finde frem til en løsning som kan opfylde behovet.

TILPASSES BRUGERENS BEHOV

Softwaren programmeres til den individuelle bruger og kan justeres løbende, hvis bevægelsesmønstret ændrer sig undervejs.

FRA TKS TIL BRUGEREN

Denne model skal ses, som en vejledning til hvordan forløbet er, fra kontakt med TKS til produktet er hos brugeren

Forventningsafstemning

TKS indgår i dialog med bruger og visitator, med henblik på at se om hjælpemidlet kan udfylde behovet for brugeren.

01

02

Bevillingsprocess

Brugeren søger om bevilling i samarbejde med visitator

Installation og tilpasning

TKS installerer samt tilpasser Itremor til brugerens behov

03

04

Service check

Efter ca. 14 dage vil TKS følge op, med henblik på om hjælpemidlet virker som ønsket. Hvis der er behov kan TKS hjælpe med teknisk assistance.

HVAD ER INKLUDERET?

I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får det bedste ud af at bruge Itremor og derfor er service og hjælp selvfølgelig inkluderet i prisen.

PRODUKT OG SERVICE

- Itremor boks med software
- Individuel installation og kalibrering af boks til bruger
- Teknisk service under og efter

HER KAN DU FINDE DET ONLINE



www.tks-technology.dk

Hjælpemiddelbasen

<https://hmi-basen.dk/>



<https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8>



Facebook

<https://www.facebook.com/tksttechnology/>



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/tks-as/about/>

KONTAKT OS

Søren Mørch +45 60 68 84 68
sm@tk-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk

