

## Klargøring af sensor

DEMOS-10 sensoren kan rumme data for maksimalt 14 dage det er derfor vigtigt at du inden du sætter sensoren fast på plastret, sikrer dig at sensoren er tømt for data efter sidste måling.

Det gør du ved at kontrollere at overførsel af data er Up to Date i SensMotion App'en.

Når du sætter sensoren på plastret så er det **vigtigt** at forsiden med tal på sensoren er synlig, så sidder sensoren rigtigt.

1. Åbn posen med plastret



2. Vip beskyttelsesfolien fra plastret ud til siden



3. Fjern folien med samme form som sensoren



4. Tryk sensoren fast inden for de markerede streger



5. Læg forsigtigt det øverste lag folie hen over sensoren



6. tryk forsigtigt folien ned langs sensoren



## Påsætning af sensor

Sensoren skal anbringes **vandret** cirka midt på ryggen enten til højre eller venstre for rygøjlen. Det er **vigtigt** at sensoren sidder så man kan læse tallet på sensoren.


1. Fjern folien på bagsiden af plastret



2. Sæt plastret fast på ryggen af borgeren



3. Skift plastret efter 3-4 dage.

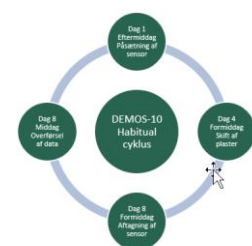

## Skift af plaster eller fjernelse af sensor

Normalt måles der med DEMOS-10 hen over 8 døgn. Det anbefales at plastret skiftes midt i perioden.

1. Tag fat i et hjørne af plastret og træk plastret forsigtigt af
2. Frigør sensoren fra plastret ved at presse den ud som vist
3. Rengør sensoren og overfør data vha. App'en

