

Gebrauchsanleitung für SmartBond SC

Kieferorthopädischer Kleber (Gel) für Metall-, Kunststoff- und Keramikbrackets.
Verklebt sich mit Komposit und Porzellanwerkstoff. Ethylcyanoacrylat.
Anweisungen beziehen sich auf die Bilder in der Broschüre SM-007.

Klebeanleitung

1. Reinigen
2. Abspülen
3. Ätzen mit Ätzel (10-20 Sekunden)
4. Gründlich abspülen, nicht trocknen
5. Kleber dünn auftragen
6. Bracket auf die feuchte Zahnoberfläche kleben; stellen Sie sicher, dass zwischen Bracket und Zahn keine Lücke besteht
7. Maximal 5 Sekunden ausrichten und dann andrücken
8. Härtet in 3-5 Minuten aus

Dispensieranleitung

1. Kolben drehen
2. Kolben vorsichtig mit der Handfläche oder mit dem Daumen drücken, um Adhäsiv zu entnehmen
3. Kolben zurückziehen, um Nachfließen zu vermeiden; Eindringen von Luft in die Spritze vermeiden
4. Ev. auftretende Luftblasen vorsichtig durch Drücken des Kolbens entfernen
5. Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Verschluss, um ein Austrocknen des Klebstoffes zu vermeiden



Warnung!

- Reizend
- Verklebt die Haut in Sekunden

