

## Instrucciones para SmartBond SC

Adhesivo de ortodoncia (gel) para brackets metálicos, plásticos y cerámicos.  
Se adhiere a materiales de composite y de porcelana. Etil cianoacrilato.  
Las instrucciones se refieren a las imágenes en el manual de instrucciones SM-007.

### Bonding instructions

1. Limpiar
2. Enjuagar
3. Grabado (10-20 segundos)
4. Enjuague bien, no seque
5. Aplicar el adhesivo con moderación
6. Alinear en superficie mojada. Asegúrese de que no haya espacio entre el bracket y el diente
7. Ajuste máximo 5 segundos y pulse
8. El adhesivo se fija en 3-5 minutos

### Instrucciones de dispensación

1. Gire el mango
2. Empuje el mango suavemente para dispensar adhesivo con su palma o pulgar
3. Tire del mango hacia atrás para detener el flujo posterior; evite que entre aire en la jeringa
4. Si se produce una bolsa de aire – expulse con cuidado el aire con el mango
5. Asegurar un cierre adecuado para evitar que el adhesivo se seque



### ¡Advertencia!

- Irritante
- Se adhiere a la piel en segundos

