

## Instructions pour SmartBond SC

Adhésif orthodontique (gel) pour brackets métal, plastique et céramique.  
Colles pour matériaux composites et porcelaine. Cyanoacrylate d'éthyle.  
Les instructions se réfèrent aux images de la brochure N° SM-007.

### Instructions d'utilisation

1. Nettoyer
2. Rincer
3. Mordancer (10-20 secondes)
4. Rincer soigneusement – ne pas sécher
5. Appliquez la colle avec parcimonie
6. Alignez-vous par rapport à la surface humide ; assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le bracket et la dent
7. Ajustez 5 secondes au maximum et appuyez
8. Fixation en 3-5 minutes

### Instructions de distribution

1. Tournez la poignée
2. Appuyez doucement sur la poignée pour répartir l'adhésif avec la paume de la main ou le pouce
3. Tirez la poignée vers l'arrière pour arrêter l'écoulement ; évitez la présence d'air dans la seringue
4. Si une poche d'air se produit, expulsez l'air précautionneusement avec la poignée
5. Assurez une fermeture adéquate pour éviter le dessèchement



### Attention !

- Irritant
- Colle à la peau en quelques secondes

