

Istruzioni per SmartBond SC

Adesivo ortodontico (gel) per attacchi in metallo, plastica e ceramica.
Incolla materiali compositi e porcellana. Etil cianoacrilato.
Le istruzioni si riferiscono alle immagini nella brochure SM-007.

Istruzioni per il bonding

1. Pulire
2. Sciacquare
3. Mordenzare (10-20 secondi)
4. Risciacquare accuratamente – non asciugare
5. Applicare l'adesivo con parsimonia
6. Allineare sulla superficie bagnata; assicurarsi che non ci sia spazio tra l'attacco e il dente
7. Adattare per massimo 5 secondi e premere
8. Tempo di adesione 3-5 minuti

Istruzioni di erogazione

1. Manico di torsione
2. Spingere delicatamente il manico per erogare l'adesivo con il palmo o il pollice
3. Tirare indietro il manico per arrestare il flusso a seguire; evitare l'aria nella siringa
4. Se si verifica una sacca d'aria – spingere delicatamente l'aria con il manico
5. Assicurare una chiusura adeguata per evitare che si asciughi



Avvertimento!

- Irritante
- Incolla la pelle in pochi secondi

