

Instruksjoner for SmartBond SC

Ortodontisk lim (gel) for metall, plast og keramisk brackets.
Binder til kompositt og porselen materialer. Etylcianoakrylat.
Instruksjonen refererer til bilder i brosjyren SM-007.

Bondinginstruksjoner

1. Rengjør
2. Skyll
3. Etse (10-20 sekunder)
4. Skyll grundig – ikke tørk
5. Påfør limet sparsomt
6. Juster på våt overflate; sørg for at det ikke er avstand mellom bracket og tann
7. Juster i maksimalt 5 sekunder og trykk
8. Fester til overflaten på 3-5 minutter

Dispenseringsinstruksjoner

1. Vri håndtaket
2. Skyv håndtaket forsiktig med håndflaten eller tommelen for å dispensere lim
3. Trekk tilbake håndtaket for å stoppe etterløpet; unngå luft i sprøyten
4. Ved luftlomme – skyv forsiktig ut luften med håndtaket
5. Sørg for riktig lukking for å unngå uttørking



Advarsel!

- Irriterende
- Binder huden på sekunder

