

## Instrukcje dla SmartBond SC

Klej ortodontyczny (żel) do metalowych, plastikowych i ceramicznych zamków. Wiąże z materiałami kompozytowymi i porcelanowymi. Cyjanoakrylan etylu. Instrukcje dotyczące klejenia odnoszą się do zdjęć w broszurze SM-007.

### Instrukcje klejenia

1. Wyczyść
2. Spłucz
3. Wytrawianie (10-20 sekund)
4. Dokładnie spłucz – nie susz
5. Nakładaj klej oszczędnie
6. Wyrównaj na mokrej powierzchni; upewnij się, że nie ma szczeliny między zamkiem a zębem
7. Ustawiaj maksymalnie 5 sekund i dociśnij
8. Wiązanie następuje w ciągu 3-5 minut

### Instrukcja dozowania

1. Przekręć uchwyt
2. Delikatnie pchnij uchwyt dłonią lub kciukiem, aby dozować klej
3. Pociągnij do tyłu uchwyt, aby zatrzymać przepływ; unikaj dopływu powietrza do strzykawki
4. Jeśli pojawi się bańka powietrza - ostrożnie wypchnij powietrze za pomocą uchwytu
5. Zapewnij prawidłowe zamknięcie, aby uniknąć wysuszenia



### Ostrzeżenie!

- Podrażnia
- Skleja skórę w kilka sekund

