

## Οδηγίες για το SmartBond SC

Κόλλα Ορθοδοντικής (γέλη) για μεταλλικά, πλαστικά και κεραμικά άγκιστρα.  
Συγκολλάται σε υλικά σύνθετης ρητίνης και πορσελάνης. Κυανοακρυλικό αιθύλιο.  
Οι οδηγίες συγκόλλησης αναφέρονται σε εικόνες στο φυλλάδιο SM-007.

### Οδηγίες συγκόλλησης

1. Καθαρίστε
2. Ξεπλύνετε
3. Αδροποιήστε (10-20 δευτερόλεπτα)
4. Ξεπλύνετε προσεκτικά - μην στεγνώσετε
5. Εφαρμόστε την κόλλα σε μικρή ποσότητα
6. Ευθυγραμμίστε επάνω στην υγρή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου κενό μεταξύ αγκίστρου και δοντιού.
7. Προσαρμόστε για 5 δευτερόλεπτα το μέγιστο και πιέστε
8. Η κόλλα πήζει σε 3-5 λεπτά

### Οδηγίες διανομής

1. Περιστρέψτε τη λαβή
2. Ωθήστε ελαφρά τη λαβή με την παλάμη ή τον αντίχειρά σας για να διανείμετε την κόλλα
3. Τραβήξτε πίσω τη λαβή για να σταματήσετε τη ροή. Αποφύγετε την είσοδο αέρα στη σύριγγα
4. Εάν δημιουργηθεί θύλακας αέρα, ωθήστε προς τα έξω τον αέρα προσεκτικά με τη λαβή
5. Εξασφαλίστε σωστό κλείσιμο για να αποφύγετε το στέγνωμα της κόλλας



### Προειδοποίηση!

- Ερεθιστικό
- Συγκολλάται στο δέρμα σε δευτερόλεπτα

