



## Opstilling af Modux

1. Sikr dig at hjulene i hovedenden er låst i den ønskede placering af sengen.  
(Hovedenden er den ende hvor fjernbetjeningen og strømforsyning sidder.)


2. Løft låsen i begge sider uden at fjerne dem helt fra sengen.

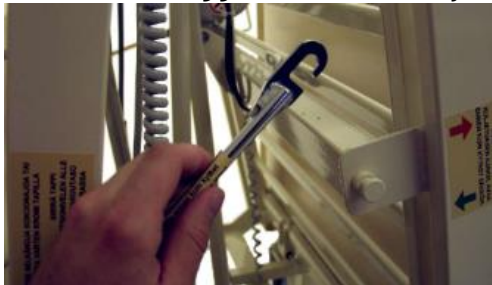


3. Brug nu fjernbetjening til at folde sengen ud.

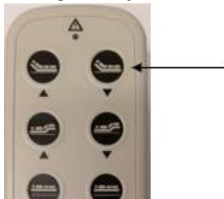

4. Træk nu låsen helt ud og placer den under sengens ramme i dens holder.

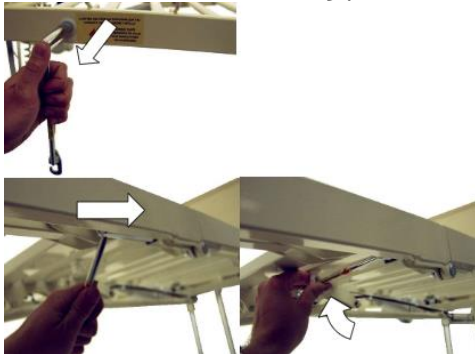

5. Sengehestene skal nu kobles på siden, mærkninger på siden af sengen viser hvordan den skal vende.

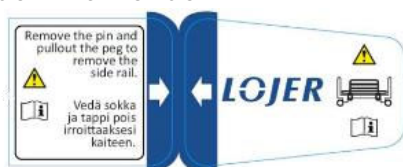

6. Fjern splitten i bunden af sengehesten bane i fodenden. Bemærk den sidder på den anden side af skruen.



7. Pindene kan nu trækkes ud, bemærk rækkefølge og orientering af pindene.



8. Pindene kan nu indsættes i enden af sengehesten og skal indsættes i samme rækkefølge og orientering som de sad i sengens skinne.



9. Sengehesten kan nu gnidningsfrit løftes op og ned i skinnen og kan låses i toppen ved hjælp af en knap på siden.
10. Afsluttende kan man sikre sig at sengen har fri bevægelighed fra ledninger og vægge inden man påbegynder brug. Det anbefales også at lade hjulene være låst når sengen ikke transporteres.