

Spazzolino aspirante non trattato di Sage con Soluzione orale di Sage

REF 6977-BP



Foglio illustrativo

Contenuto:

- (1) Spazzolino aspirante non trattato, Soluzione orale di Sage da 7 mL, (1) Tampone applicatore.

Indicazioni per l'uso

Spazzolino aspirante: Aiuta nella rimozione di placca dentaria, detriti e secrezioni orali.

Istruzioni:

Spazzolino aspirante: Istruzioni: Aprire il pacchetto con la soluzione con le dita. Strappare la confezione aperta. Collegare lo Spazzolino aspirante alla linea di aspirazione. Spazzolare i denti e la cavità orale per 1 minuto. Per l'aspirazione, posizionare il pollice sulla porta. Risciacquare per pulire il tubo dopo l'uso. Espellere. Utilizzare il Tampone applicatore se è necessaria una pulizia aggiuntiva.

Soluzione orale di Sage: Non sciacquare con acqua o altri colluttori, lavarsi i denti o mangiare subito dopo aver usato la Soluzione orale di Sage. Non ingoiare. Per ridurre al minimo lo scolorimento dei denti, pulirli con spazzolino e filo interdentale ogni giorno. CONSERVARE A TEMPERATURA SUPERIORE AL CONGELAMENTO (0°C o 32°F).

Attenzione:

Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura orale. Utilizzare un morso nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il dispositivo sia riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Spazzolino aspirante: MDD 93/42/EEC

Tampone applicatore: MDD 93/42/EEC

Soluzione orale di Sage: EC Cosmetic Regulation

Specifiche

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Spazzolino aspirante non trattato di Sage con Soluzione orale di Sage |
| Codice prodotto | 6977-BP |
| Descrizione | Sistema di aspirazione monouso per pazienti a rischio di polmonite da aspirazione |
| Accreditamento del fabbricante | ISO 13485:2003 |
| Data di scadenza | 24 mesi dalla data di produzione |
| Lunghezza dello spazzolino aspirante | 18,4 cm |
| Lunghezza del tampone applicatore | 15,9 cm |
| Lunghezza di ciascuna setola | 8 mm |
| Quantità di soluzione in ciascuna bustina | 7 mL |
| Quantità per confezione | 100 |

Caratteristiche e benefici

Spazzolino aspirante

| | |
|--|---|
| Setole in nylon ultra-morbide | • Elimina delicatamente la placca dentale, i residui e le secrezioni orali che trasportano patogeni respiratori |
| Oltre 3.100 setole o "punti di contatto" | • Pulisce ed elimina la placca |
| Tre porte di aspirazione | • Evitano l'ostruzione e mantengono la pervietà ai residui |
| Disponibile con impugnatura di aspirazione | • Offre un controllo variabile dell'aspirazione e permette di cambiare velocemente gli strumenti |
| Si collega direttamente alle linee di aspirazione standard | • Contribuisce alla massima forza di aspirazione |
| Impugnature angolate | • Garantisce la pulizia del fondo del cavo orale |

Spazzolino aspirante non trattato di Sage con Soluzione orale di Sage

Composizione della Soluzione orale di Sage

Acqua
Alcool
Glicerina
PEG-40 sorbitano diisostearato
Aroma
Clorexidina digluconato
Saccarina sodica
Blu 1 (Cl 42090)



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

sageproductsglobal.com

23191B-IT
Copyright © 2018 Stryker

Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l'ampiezza dell'offerta di prodotti Stryker. Prima di utilizzare un prodotto Stryker, il professionista sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo, l'etichetta e/o le istruzioni del prodotto.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, in quanto la disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi e/o alle prassi mediche dei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker locale.

Stryker Corporation o le relative divisioni o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno presentato domanda di registrazione dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, Perox-A-Mint. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari o detentori.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.