

Sistema per la cura orale Petite di Sage q4

REF 6714-X



Specifiche

Nome del prodotto	Sistema per la cura orale Petite di Sage q4
Codice prodotto	6714-X
Descrizione	Kit giornaliero per l'igiene orale contenente gli strumenti per ciascuno turno infermieristico di 4 ore
Accreditamento del fabbricante	ISO 13485:2003
Informazioni sulla conservazione	Conservare a temperature superiori a 0°C
Data di scadenza	24 mesi dalla data di produzione
Lunghezza dello spazzolino aspirante	14,1 cm
Lunghezza di ciascuna setola	8 mm
Lunghezza del tampone aspirante	18,4 cm
Lunghezza del tampone applicatore	15,9 cm
Quantità di soluzione in ciascuna bustina	7 mL
Quantità di idratante orale	2 g
Quantità per confezione	15

Caratteristiche e benefici

Spazzolino aspirante

Setole in nylon ultra-morbide	• Elimina delicatamente la placca dentale, i residui e le secrezioni orali che trasportano patogeni respiratori
Pratica porta per pollice	• Consente di controllare facilmente l'aspirazione e di cambiare velocemente gli strumenti
Tre porte di aspirazione	• Evitano l'ostruzione e mantengono la pervietà ai residui
Si collega direttamente alle linee di aspirazione standard	• Contribuisce a favorire la compliance
Disponibile con impugnatura di aspirazione	• Offre un controllo variabile dell'aspirazione e permette di cambiare velocemente gli strumenti
Impugnature angolate	• Garantisce la pulizia del fondo del cavo orale

Tampone aspirante

Tampone aspirante	• Contribuisce a eliminare i residui e le secrezioni tra un uso dello spazzolino e l'altro
Testine in spugna morbida	• Delicato sui tessuti fragili

Composizione del collutorio senza alcool

Acqua
Sorbitolo
Aroma
Sorbato di potassio
Polisorbato 80
Polisorbato 20
Cetilpiridinio cloruro
Acido citrico
Blu 1 (CI 42090)

Composizione dell'idratante orale

Acqua
Cocos nucifera (olio di cocco)
Xilitolo
Aroma
Gomma di cellulosa
Tocoferolo acetato
Olio di foglie di mentastro verde (Mentha viridis)
Polisorbato 20
Polisorbato 80
Sorbato di potassio
Carbomer
Cetilpiridinio cloruro

Sage Oral Care Petite System q4

Foglio illustrativo

Sommario:

- (2) confezioni di (1) spazzolino aspirante Petite non trattato, collutorio senza alcool da 7 mL, idratante orale da 2 g e (1) tampone applicatore.
- (4) confezioni di (1) tampone aspirante Petite non trattato, collutorio senza alcool da 7 mL, idratante orale da 2 g e (1) tampone applicatore.

Indicazioni per l'uso:

Spazzolino aspirante: Aiuta nella rimozione di placca dentaria, detriti e secrezioni orali.

Tampone aspirante: Aiuta nella rimozione di secrezioni orali e detriti.

Istruzioni:

Spazzolino aspirante: Istruzioni: Aprire il pacchetto con la soluzione con le dita. Strappare la confezione aperta. Collegare lo spazzolino aspirante alla linea di aspirazione. Spazzolare i denti e la cavità orale per 1 minuto. Per l'aspirazione, posizionare il pollice sulla porta. Risciacquare per pulire il tubo dopo l'uso. Espellere. Distribuire dell'idratante orale sul tampone applicatore e applicarlo sulle labbra e nella cavità orale, ove necessario.

Tampone aspirante: Istruzioni: Aprire il pacchetto con la soluzione con le dita. Strappare la confezione aperta. Collegare il tampone aspirante alla linea di aspirazione. Pulire la bocca per 1 minuto. Per l'aspirazione, posizionare il pollice sulla porta. Risciacquare per pulire il tubo dopo l'uso. Espellere. Distribuire dell'idratante orale sul tampone applicatore e applicarlo sulle labbra e nella cavità orale, ove necessario.

Attenzione:

Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura orale. Utilizzare un morso nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il dispositivo sia riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Spazzolino aspirante e tampone aspirante: MDD 93/42/EEC

Tampone applicatore: MDD 93/42EEC

Collutorio senza alcool e Idratante orale: EC Cosmetic Regulation 1223/2009

Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l'ampiezza dell'offerta di prodotti Stryker. Prima di utilizzare un prodotto Stryker, il professionista sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo, l'etichetta e/o le istruzioni del prodotto.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, in quanto la disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi e/o alle prassi mediche dei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker locale.

Stryker Corporation o le relative divisioni o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno presentato domanda di registrazione dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, Perox-A-Mint. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari o detentori.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA

sageproductsglobal.com

24677B-IT
Copyright © 2018 Stryker