

# Soluzione orale di Sage



REF 6075-X

## Foglio illustrativo

### Contenuto:

- (1) Tampone applicatore con bicarbonato di sodio.

**Indicazioni per l'uso:** Facilita la rimozione di residui e secrezioni orali. Può essere usato per applicare soluzioni per l'igiene orale.

**Istruzioni:** Inumidire il tampone con acqua o soluzione. Pulire la bocca per 1 minuto. Istruire ad espettorare. Espellere.

### Attenzione:

Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura orale. Utilizzare un morso nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il dispositivo sia riutilizzato.

Monouso.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Tampone applicatore: MDD 93/42/EEC

### Composizione del bicarbonato di sodio

- Acqua
- Bicarbonato di sodio
- Gomma di cellulosa
- Sodio lauril solfato
- Aroma
- Saccarina sodica
- Benzoato di sodio



Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA

[sageproductsglobal.com](http://sageproductsglobal.com)

25672-IT  
Copyright © 2018 Stryker

## Specifiche

Nome del prodotto	Soluzione orale di Sage
Codice prodotto	6075-X
Descrizione	Tampone applicatore progettato per facilitare la rimozione di residui e secrezioni orali e per l'applicazione di soluzioni per la cura orale
Accreditamento del fabbricante	ISO 13485:2016
Lunghezza del tampone	15,9 cm
Quantità per confezione	800
<b>Caratteristiche e benefici</b>	
<b>Tampone</b>	
Tampone	• Contribuisce a eliminare i residui e le secrezioni tra un uso dello spazzolino e l'altro
Testine in spugna morbida	• Delicato sui tessuti fragili

### Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l'ampiezza dell'offerta di prodotti Stryker. Prima di utilizzare un prodotto Stryker, il professionista sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo, l'etichetta e/o le istruzioni del prodotto.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, in quanto la disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi e/o alle prassi mediche dei singoli mercati. In caso di domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante Stryker locale.

Stryker Corporation o le relative divisioni o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno presentato domanda di registrazione dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker, Perox-A-Mint. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari o detentori.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.