

Sistema Tampone orale Sage con collutorio Corinz™

REF 6583-X



Informazioni sull'imbballaggio

Contenuto:

- (2) tamponi applicatori con bicarbonato di sodio, (1) collutorio orale Corinz da 7 ml.

Indicazioni per l'uso: Facilita la rimozione di residui e secrezioni orali.

Istruzioni: Rilasciare il liquido della bustina effettuando una pressione con i pollici. Aprire il blister rimuovendo la pellicola. Pulire la cavità orale per 1 minuto. Istruire ad espettorare. Smaltire secondo il protocollo ospedaliero e le normative locali. Ripetere se necessario o prescritto.

Attenzione: Non consentire al paziente di mordere lo strumento per l'igiene orale. Utilizzare un morso (bite) nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere le istruzioni. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo non corretto/esserci un rischio potenziale di contaminazione crociata in caso il dispositivo venga riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Tampone applicatore: MDD 93/42/CEE **CE**

Collutorio orale Corinz: Regolamento CE sui prodotti cosmetici 1223/2009

Specifiche prodotto

Nome del prodotto	Tampone orale Sage con collutorio Corinz
Codice prodotto	6583-X
Descrizione	Facilita la rimozione di residui e secrezioni orali
Accreditamento del fabbricante	ISO 13485:2016
Data di scadenza	24 mesi dalla data di produzione
Lunghezza del tampone applicatore	15,9 cm
Quantità di soluzione nel collutorio Corinz™	7 ml
Quantità per confezione	100

Caratteristiche e vantaggi

Tampone applicatore

- | | |
|---------------------|--|
| Tampone applicatore | <ul style="list-style-type: none"> • Contribuisce a eliminare i residui e le secrezioni tra un uso dello spazzolino e l'altro |
|---------------------|--|

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Trattato con bicarbonato di sodio | <ul style="list-style-type: none"> • Il bicarbonato di sodio offre una pulizia più efficace e rinfresca il cavo orale |
|-----------------------------------|--|

- | | |
|---------------------------|--|
| Testine in spugna morbida | <ul style="list-style-type: none"> • Delicato sui tessuti fragili |
|---------------------------|--|

Sistema Tampone orale Sage con collutorio Corinz™

Ingredienti del collutorio Corinz™

Acqua
Glicerina
Xilitolo
Aroma
Idrossietilcellulosa
Sorbato di potassio
Cetilpiridinio cloruro
Saccharina sodica
Acido citrico
Polisorbato 20
Polisorbato 80
Mentolo

Composizione del bicarbonato di sodio

Acqua
Bicarbonato di sodio
Gomma di cellulosa
Sodio lauril solfato
Aroma
Saccharina sodica
Benzoato di sodio



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
t: 0808 189 0456

stryker.com

SMACC # 23796
26985-IT
Copyright © 2020 Stryker
02/2020

Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno scopo dimostrativo dell'offerta di prodotti Stryker. Un operatore sanitario deve sempre fare riferimento al foglietto illustrativo, all'etichetta del prodotto e/o alle istruzioni per l'uso prima di utilizzare un prodotto Stryker.

I prodotti possono non essere disponibili in tutti i mercati, dal momento che la disponibilità degli stessi è soggetta a prassi normative e/o mediche locali. Si invita a contattare il rappresentante Stryker in caso di domande riguardo la disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona.

Stryker Corporation, le sue succursali o altre entità affiliate aziendali sono titolari di, utilizzano o hanno richiesto i seguenti marchi registrati o marchi di servizio: Stryker, Corinz. Altri eventuali marchi sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.