

# Sistema tampone orale Sage con aspirazione e collutorio Corinz™

REF 6584-X



## Informazioni sull'imballaggio

### Contenuto:

- (2) tamponi con canale di aspirazione con bicarbonato di sodio, (1) Collutorio Corinz da 7 ml.

**Indicazioni per l'uso:** Facilita la rimozione di residui e secrezioni orali.

**Istruzioni:** Rilasciare il liquido della bustina effettuando una pressione con i pollici. Aprire il blister rimuovendo la pellicola. Collegare il tampone al sistema di aspirazione. Pulire la cavità orale per 1 minuto. Per aspirare posizionare il pollice sulla valvola integrata. Risciacquare per pulire la linea di aspirazione dopo l'uso. Smaltire secondo il protocollo ospedaliero e le normative locali. Ripetere se necessario o prescritto.

**Attenzione:** Non consentire al paziente di mordere lo strumento per l'igiene orale. Utilizzare un morso (bite) nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere le istruzioni. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo non corretto/esserci un rischio potenziale di contaminazione crociata in caso il dispositivo venga riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Tampone con canale di aspirazione: MDD 93/42/EEC **CE**<sub>2797</sub>

Collutorio orale Corinz: Regolamento CE sui prodotti cosmetici 1223/2009

## Specifiche prodotto

Nome del prodotto	Sistema tampone orale Sage con aspirazione e collutorio Corinz™
Codice prodotto	6584-X
Descrizione	Facilita la rimozione di secrezioni orali e residui
Accreditamento del fabbricante	ISO 13485:2016
Data di scadenza	24 mesi dalla data di produzione
Lunghezza del tampone con canale di aspirazione	18.4 cm
Quantità di soluzione nel Collutorio orale Corinz	7 ml
Quantità per confezione	100

## Caratteristiche e vantaggi

### Tampone con canale di aspirazione

Tampone con canale di aspirazione	• Contribuisce a eliminare i residui e le secrezioni tra un uso dello spazzolino e l'altro
Trattato con bicarbonato di sodio	• Il bicarbonato di sodio offre una pulizia più efficace e rinfresca il cavo orale
Testine in spugna morbida	• Delicato sui tessuti fragili

# Sistema tampone orale Sage con aspirazione e collutorio Corinz™

## Ingredienti del collutorio orale Corinz

Acqua  
Glicerina  
Xilitolo  
Aroma  
Idrossietilcellulosa  
Sorbato di potassio  
Cetilpiridinio cloruro  
Saccharina sodica  
Acido citrico  
Polisorbato 20  
Polisorbato 80  
Mentolo

## Composizione del bicarbonato di sodio

Acqua  
Bicarbonato di sodio  
Gomma di cellulosa  
Sodio lauril solfato  
Aroma  
Saccharina sodica  
Benzoato di sodio



Sage Products LLC  
3909 Three Oaks Road  
Cary, IL 60013 USA  
t: 0808 189 0456

**stryker.com**

SMACC # 23797  
26986-IT  
Copyright © 2020 Stryker  
02/2020

### **Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di professionisti sanitari.**

Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti sanitari ricevano la formazione sull'uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.

Le informazioni presentate hanno scopo dimostrativo dell'offerta di prodotti Stryker. Un operatore sanitario deve sempre fare riferimento al foglietto illustrativo, all'etichetta del prodotto e/o alle istruzioni per l'uso prima di utilizzare un prodotto Stryker.

I prodotti possono non essere disponibili in tutti i mercati, dal momento che la disponibilità degli stessi è soggetta a prassi normative e/o mediche locali. Si invita a contattare il rappresentante Stryker in caso di domande riguardo la disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona.

Stryker Corporation, le sue succursali o altre entità affiliate aziendali sono titolari di, utilizzano o hanno richiesto i seguenti marchi registrati o marchi di servizio: Stryker, Corinz. Altri eventuali marchi sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.

Questo documento non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.