

Indhold, advarsels- og brugsvejledning

Alcohol free Hand Sani – Hånddesinfektionsmiddel. Brugsvejledning: Hand Sani benyttes for at mindske mulige bakterier og andre mikroorganismer på huden. Regelmæssig brug giver ekstra beskyttelse. Advarsel: Må kun anvendes på hænderne. Må ej drikkes eller indtages. Undgå at væsken kommer i kontakt med øjne eller åbne sår. Skulle dette hænde, skyl grundigt med rent vand.

Topical irrigation solution – Øjenskylmiddel. Anvendelsesområde: Ved spontan og lokal opstået irritation af øjne, samt små sår eller forbrænding af huden. Advarsel: Kun til overfladebehandling. Kasserer efter første brug. Anvend ikke produktet, hvis emballagen viser tegn på brug eller skade. Indhold: 0.9% Natriumklorid (Salt) opløsning.

Instant Cold – Ispose. Anvendelse: Benyttes når køling af skader er nødvendigt. Ryst posen så indholdet er nederst i posen. Klem posen kraftigt. Forseglingen inde i posen bliver brudt og køleprocessen påbegynder. Ryst igen for jævn fordeling af køleeffekt. Posen vikles ind i håndklæde eller lign. og placeres på det nødvendige område på patienten. Advarsel: Opbevares ved stuetemperatur. Kasserer efter første brug. Anvendes altid viklet ind med et håndklæde eller andet stof. Må ej anvendes af patienter med nedsat følesans overfor kulde. Opbevares utilgængeligt for børn. Kun til overfladebehandling. Indholdet af posen er sundhedsskadeligt. Ved utilsigtet indtagelse kontakt straks læge eller alarmcentral. Beskadig ikke posen. Ved hud- eller øjenkontakt med posens indhold, skyl straks med rigelig vand og kontakt læge eller alarmcentral. Indhold: Ammoniumnitrat, Vand.

Antiseptic Pen – Antiseptisk stift. Anvendelse: Stopper små blødninger. Fugt spidsen og gnid forsigtigt på såret.

Alcohol Prep Pad – Alkoholerviet. Anvendelse: Kun til overfladebehandling og engangsbrug. Til forsigtig rensning af sår- Indhold: 1 pad inholder 70% Isopropanolalkohol.

Antiseptic towelette – Sårrens-servietter. Anvendelse: Brug servietten forsigtigt til rengøring af mindre skader, rifter eller forbrændinger. Beskytter mod infektioner. Advarsel: Kun til overfladebehandling. Må ej bruges på eller om øjnene. Ikke egnet til større skader. Ved større skader opsøg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhold: Benzalkoniumklorid 0,13%

Sting Relief Prep Pad – Insektserviet. Anvendelse: Benyttes til insektstik eller -bid. Påføres stik/bid, renses forsigtigt og smides ud. Kun til enkeltbrug. Advarsel: Kun til overfladebehandling. Må ej bruges på eller om øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhold: 1 serviet Benzocain 6%, Alkohol 60%

Hydrogen Peroxide – Brintoverilte. Anvendelse: Til behandling af små snit og sår. Antibakteriel og forebygger infektioner. Påføres forsigtigt på såret. Indhold 3% Brintoverilteløsning

Kit Indhold:

- 1 Ispose
- 1 Alutæppe
- 5 plaster
- 1 sæt Engangshandsker (latex + pulverfri)
- 4 alkohol desinfektionsservietter
- 2 stikplaster
- 2 sårrensservietter
- 1 gummi årepresse
- 3 ruller ikke-klæbende forbinding
- 1 rulle tape
- 1 saks
- 2 Lavt vedhængende pad forbinding 7,5 cm x 7,5 cm
- 10 vatpinde
- 1 Oralsprøjte
- 1 tungespatel
- 1 Genoplivningsindblæser
- 1 Håndsprit 60 ml.
- 1 Øjenskyll 15 ml.
- 1 Brintoverilte 3% 100 ml.
- 1 Sårstift
- 1 Børste
- 1 Adventurtaske