



Bruksanvisning Posifon Active

Paketinnehåll

1. Posifon Active
2. USB laddkabel
3. Adapter




Extra tillbehör som finns utöver standard

- a. Låsbart spänne
- b. Laddplatta
- c. WiFi-fyr för inomhuspositionering. Genom WiFi fyrar kan en normalanvändare få uppemot fem dygns batteritid.

Kom igång

Ladda enheten

Placera den magnetiska laddkabeln mot Actives laddkontakt för att påbörja laddning. Se bild nedan. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter.

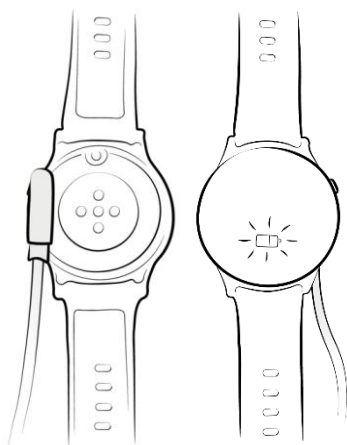


När enheten laddas, syns det på enhetens display samt att ett talmeddelande spelas upp.

Vänligen ladda enheten minst fyra timmar innan första användning. När displayen lyser upp och visar laddsbolen har laddningen påbörjats. Enheten laddar fullt på ungefär tre timmar.

Ladda enheten via laddplatta:

1. Anslut kabeln till laddplattan:
2. Placera enheten på laddplattan:

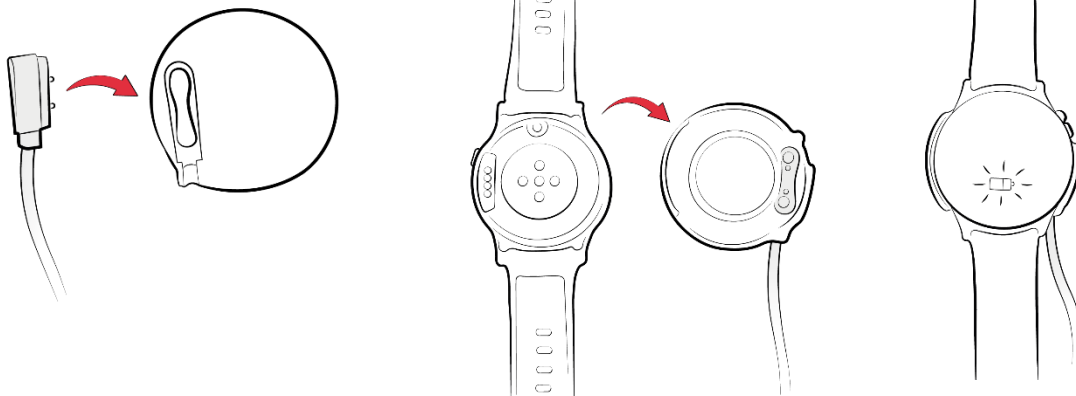

Starta enheten

När du sätter enheten på laddning kommer enheten att starta automatiskt. Skulle den mot förmodan inte göra det, låt enheten ladda minst tio minuter och tryck sedan på knappen på enhetens sida i tre sekunder.

Att ringa till enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Posifon Active.

Genom att ringa det numret kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Användaren kan själv svara genom att trycka på displayen.

Önskar ni att enheten svarar automatiskt, vänligen kontakta Posifons support.

Ska enbart ett fåtal personer kunna ringa enheten eller ingen alls? Kontakta Posifons support så kan vi ställa in det för er.

Om du inte kan ringa enheten så finns det några saker som vi vill att ni dubbelkollar:

1. Är enheten på och har mobiltäckning? Det ser du i enhetens display.
2. Har ni skrivit in rätt nummer? studera ert leveransbrev. Är det ett utländskt nummer då måste ni ange + framför numret likt det står angivet på leveransbrevet.
3. Får ni ringa utländska samtal från er telefon? Undersök om ni har någon spärr på abonnemanget för utlandssamtal.

Kontakta Posifons support så kan vi hjälpa er att felsöka.

Hur larmar man?

Tryck och håll i larm-knappen i ca två sekunder. När enheten vibrerar och visar en larmsymbol i displayen har Active registrerat att du tryckt på larmknappen. Då börjar enheten ta sin position

och kopplar eventuellt upp ett samtal till valda larmmottagare om detta är inlagt, samt att larm skickas via tex pushnotis till appen eller annat valt larmmottagningsalternativ. Om två sekunder är för lång tid för brukaren, kontakta Posifons support så hjälper vi er att korta ner denna tid.

Genom att trycka på den röda luren på displayen eller på larmknappen under pågående samtal avslutas samtalet.

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Denna funktion kan du lägga till under brukarens profil i PosifonCare. Enheten kan ringa upp till fem nummer sekventiellt efter varandra.

Viktigt att notera är att man inte måste programmera att enheten ska ringa ett eller flera nummer. När ett larm går är det vanligt att den som hanterar larmet ringer upp enheten. Vill man att larmknappen ska vara inaktiv och inte generera ett larm går det att ändra under fliken larminställningar i PosifonCare och därefter larmtyper.

Positionsuppdatering och batterisparfunktion

Positionsuppdatering:

Active tar som standard en position var femte minut. För optimal balans mellan batteritid och precision rekommenderar vi att intervallet hålls mellan **4–6 minuter**. Observera att en lägre uppdateringsfrekvens inte alltid innebär längre batteritid, enhetens energiförbrukning är optimerad för intervallet ovan.

Inomhuspositionering och batterispar:

Active har stöd för inomhuspositionering via WiFi-accesspunkter ("fyrar"). Om enheten upptäcker två eller fler WiFi-fyrar kommer den att avstå från att söka GPS-position, vilket sparar batteri och kan förbättra positionernas kvalitet inomhus.

- En användare utan WiFi-fyrar får vanligtvis 1-2 dygns batteritid. När enheten bara är inomhus så konsumeras mer batteri då det är svårare att få till en tillförlitlig position.
- En användare med två eller fler WiFi-fyrar i hemmet kan få upp till 5 dygns batteritid.

Hur vet man om det finns WiFi-fyrar hos användaren?

- Använd telefonens WiFi-sökfunktion. Om flera nätverk syns finns sannolikt fler än en fyr i området.
- För mer detaljerad information kan en WiFi-MAC-adresskanner laddas ner.
- Active kan läsa av WiFi-fyrar på 2,4 GHz-bandet.
- Om du bara ser ett nätverk eller inga alls kan Posifons support hjälpa till att kontrollera om fler fyrar finns i närheten.
- Som tillbehör kan fler WiFi-fyrar köpas för användare som vill maximera batteritiden.

Ljud- och mikrofonvolym

Går att justera så att det passar brukarens och larmmottagarens behov. Du gör justeringen under brukarens larminställningar i PosifonCare.

Aktivera fallsensor

Aktivering eller inaktivering av fallsensorn görs under brukarens larminställningar i PosifonCare. Fallsensorn kan ställas in i tre olika nivåer och det kan behövas finjusteras utefter brukarens rörelsemönster. Standard är nivå två och sedan kan känsligheten justeras därifrån. Det är viktigt att även aktivera larmtypen "fall" under larmtyper på antingen avdelningen eller brukaren beroende på om brukarspecifika inställningar är aktiverade eller ej. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

Övriga inställningar

Röstmeddelande

Active kan ge ifrån sig olika röstmeddelanden i olika situationer. Följande röstmeddelanden stöds:

- Enhet på
- Enhet av
- Lågt batteri, ladda ditt trygghetslarm
- Trygghetslarm laddas
- Larm aktiverat

Stegmål

Active har inbyggt stegmålsfunktion. När funktionen är aktiverad får brukaren ett meddelande genom en skärmbild som visar aktuellt stegmål samt att klockan ger en lätt vibration.

De stegmål som går att aktivera är 4 000, 8 000 och 10 000 steg.

Larmtyper som stöds av Active

Det finns flera larmtyper som stöds av Active och nedan preciseras dessa. Tänk på att alla inte är standard, vissa behövs aktiveras separat med hjälp av Posifon support eller under Larminställningar och Mobila Larmtyper för att kunna användas.

Är du osäker? Kontakta Posifons support så guidar vi dig.

Områdeslarm, lämnar	Brukaren har lämnat det aktuella trygghetsområdet
Områdeslarm, ankommer	Brukaren har ankommit i det aktuella trygghetsområdet
Aktivt larm, larmknapp nedtryckt	Brukaren har tryckt på larmknappen

Manuellt larm av larmmottagare, efter sökning

Larmmottagare har konstaterat att brukare bör uppsökas, detta efter en sökning

PosifonCare har ej haft kontakt med GPS-enhet

Enhet har inte kommunicerat med Posifon-Care på angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm, kan indikera på att något är fel

Enheten är åter aktiv efter inaktivitetslarm utlöst

Enhet åter aktiv efter att inaktivitetslarm

GPS-enhet har lågt batteri

Batterinivån på enhet är under bestämd nivå. Enhet behöver laddas

GPS-enhet har stängts av

Enhet avstängd, på grund av lågt batteri

Enheten har detekterat fall

Enhet med fallsensor har detekterat fall

Ett rörelselarm har utlösts

Enhet är inte i rörelse


Ett rörelselarm har utlöst utanför trygghetsområdet


Enheten är inte i rörelse och utanför konfigurerat trygghetsområdet.

Låsbart spänne

Guide hur man öppnar och monterar det låsbara spännet till Posifon Active:

Öppna:

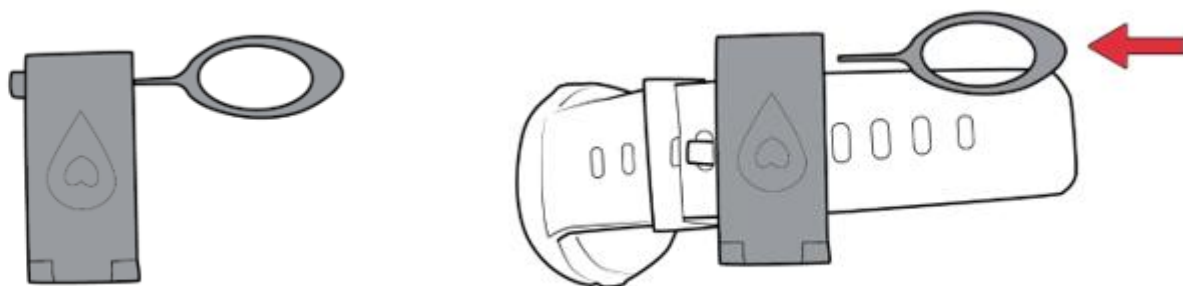

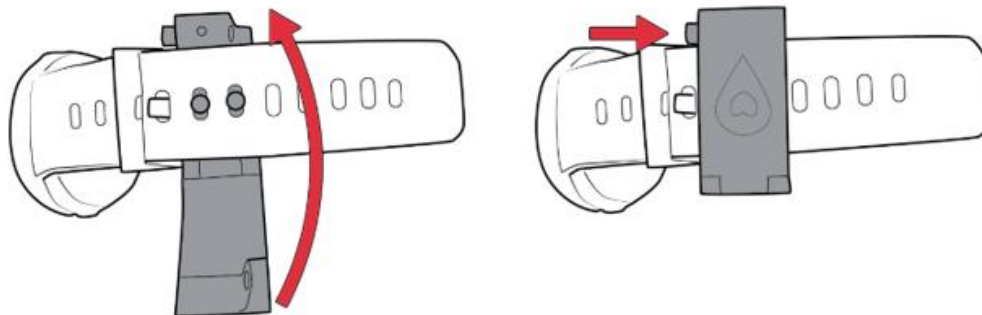

Placering, ju närmare spännet du fäster låsspännet ju svårare att ta av sig enheten. I det flesta fall är det inga problem att lämna ett hål som mellanrum i armbandet. Bilden nedan visar hur du låser spännet:

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämma med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs och behåll anvisningarna nedan.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din Posifon Active.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Posifon Active.
- Placera inte din Active nära öppen eld.
- Släng inte din Active i en brand eller utsätt den för högre värme än vad som är angivet under hårdvaruspecifikationerna nedan. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär Active, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under tre år leka med Active. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt Posifon Active-batteri utan tillåtelse från Posifon.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din Active med hjälp av en certifierad dator eller adapter.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

Garanti

Posifon lämnar ett års garanti på Posifon Active och alla tillbehör om inget annat överenskommit. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller ett år framåt. Delar eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i prestanda med nya delar.

Övrigt:

Den tekniska livslängden för Active är över två år. Torka gärna av enheter regelbundet med fuktig trasa för att säkerställa att produkten är hel och ren. Det går att använda på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedel i måttlig mängd, se viktiga säkerhetsanvisningar.

Hårdvaruspecifikation

Storlek	43 mm x 43 mm x 12,8 mm
Vikt	45g
Batteri	650mAh Litium polymer
Frekvensband	900/1900MHz, LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40
Strömkälla	5V DC, 1A
Drifttemperatur	-20°C till +80°C
Fixtid mot GPS	Varmstart 2 s. Kallstart 24s
Standby	120 timmar
IP class	IP67
Mobilnät	4G, 2G
WiFi	2.4GHZ 802.11 b/g/n

Kontakt:

Posifon AB
Adress: Mölndalsvägen 30B,
412 63 Göteborg

Hemsida: www.posifon.com
Tel. support: 031 360 75 24 (mån-fre 8.00–17.00)
Mail support: support@posifon.se

