

Sikkerhedsrøret

Er udviklet for at sikre, at rygere, med nedsat funktionsevne, ikke kommer til at sætte ild ved tab af cigareten. Er beregnet til cigaretter med filter.

Sikkerhedsrøret

Er testet. Der kan ikke falde gløder ud af hullerne i røret.

Sikkerhedsrøret

Kan derfor anvendes af sengeliggende rygere i stedet for rygeforklæde.

Sikkerhedsrøret

Skal, når man lægger det fra sig, altid lægges skråt, da man derved undgår, at cigareten slukkes.

Sikkerhedsrøret

Beholder asken indvendig, da røret er statisk magnetisk. Asken rystes let ud efter rygning.

Sikkerhedsrøret

Er håndvarmt når der ryges.

Sikkerhedsrøret

Kan rengøres med en flasketenser og mundstykket med en piberenser.

Fabrikation og salg:

P.L.Industri v/Mette Lange

Skæring Skolevej 149 - DK-8250 Egaa - Danmark

Mobil +45 2172 5922

CVR: 34264236

Mail: plindustri@hotmail.com

<https://rygeroer.dk> <https://HMI-basen.dk>

P.L.Industri v/Mette Lange

Brugervejledning

Det originale sikkerhedsrør



til



rygere

En sikker måde at ryge på

Håndlavet rygerør i brandsikkert materiale


Ingen risiko for tab af gløder

**Undgå brand, hvis cigareten
tabes**

Brug af sikkerhedsrøret – VIGTIGT!

Før du tager sikkerhedsrøret i anvendelse, læs da følgende:

1. Bundproppen skal altid være monteret i sikkerhedsrygerør, før cigaretten tændes.
2. Sæt cigaretten, med filter, ind i mundstykket og tænd cigaretten.

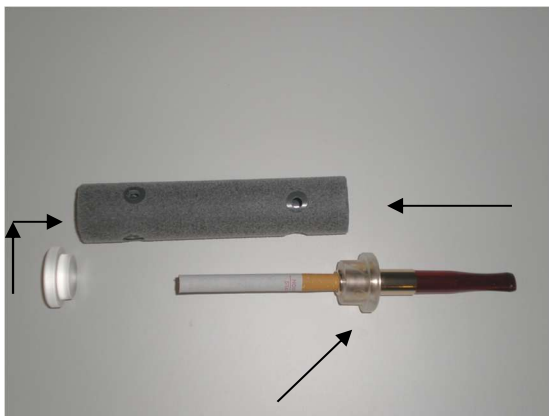


3. Monter nu mundstykket med cigaretten i sikkerhedsrøret ved at holde på akrylproppen samtidig med, at du skubber og vrider indad i røret. Tryk akrylpropperne godt ned i sikkerhedsrøret.

OBS! Hverken bundprop eller mundstykke skal dog være skubbet helt i bund, da disse er koniske.

4. Sikkerhedsrøret er korrekt samlet og der kan ryges. Holdes på grå filt og aldrig på hullerne.




5. Fjern akrylproppen, med mundstykket, ved at holde på sikkerhedsrøret og presse på akrylproppens kant opad. Evt. hive og vippe i akrylkanten. Bundproppen fjernes ligeledes ved pres med en finger nedefra mod akrylproppens kant. Nu kan asken tømmes ud.

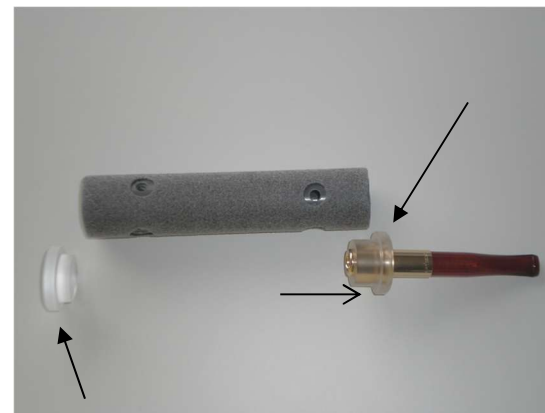

OBS! Man må aldrig vride i det brune mundstykke.

6. Efter endt rygning trykkes cigaretstumpen ud ved at skubbe det brune mundstykke ind

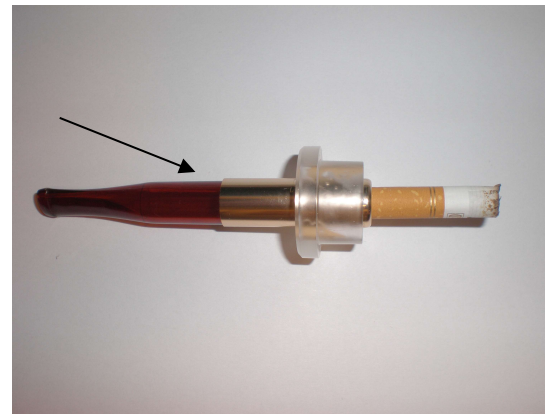

P.L.Industri påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sammensættes på anden vis, end angivet i denne brugervejledning.